

VictorReader® Stratus⁴ M

Benutzerhandbuch

 Humanware™

Victor Reader Stratus⁴ M

Benutzerhandbuch von HumanWare

Version 2-20110728

De-1-20110830

©Copyright 2011. Alle Rechte vorbehalten, Technologies HumanWare Inc.

Dieses Handbuch von Technologies HumanWare Inc. ist urheberrechtlich geschützt, alle Rechte vorbehalten. Das Handbuch darf ohne schriftliche Genehmigung von Technologies HumanWare Inc. weder ganz noch in Teilen kopiert werden.

Es wurde alles unternommen, um die Richtigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung zu gewährleisten. Weder Technologies HumanWare Inc. Und die Tochtergesellschaften HumanWare USA Inc., HumanWare Europe Limited und HumanWare Australia Pty Limited, noch unsere Händler sind für etwaige Fehler oder Auslassungen verantwortlich. Auch wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch die Nutzung der hier aufgeführten Informationen entstehen.

Erste Schritte mit dem Victor Reader Stratus⁴

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Victor Reader Stratus⁴, Ihrem neuen digitalen Abspielgerät für Hörbücher. Schließen Sie den Victor Reader Stratus an eine Steckdose an, bevor Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Dazu stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss. Er befindet sich auf der Rückseite des Players bei der rechten Ecke. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose. Direkt nach der Auslieferung des Players, nach einem Akkuwechsel oder nach längerer Nicht-Nutzung lassen Sie den Player am Besten über Nacht am Stromnetz, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig aufgeladen wird.

Die **Einschalttaste** leuchtet rot oder grün. Sie blinkt rot, wenn der Player ausgeschaltet und an einer Steckdose angeschlossen ist. Das Blinken zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird. Wenn das Blinken aufhört, ist der Akku vollständig aufgeladen. Wenn der Player eingeschaltet ist, leuchtet die **Einschalttaste** grün, unabhängig von einer Verbindung mit der Steckdose. Normalerweise dauert der Ladevorgang bis zu 4 Stunden. Bei aufgeladenem Akku können bei den meisten DAISY-Büchern bis zu 10 Stunden abgespielt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie den Victor Reader während des Ladevorgangs benutzen können.

Die Verpackung beinhaltet folgende Einzelteile: Ein Victor Reader Stratus⁴, eventuell eine Tastaturabdeckung (nicht bei allen Geräten), die abgenommen werden kann, um die Navigationstasten des Players freizugeben, ein Netzteil, eine Plastiktüte mit der Dokumentation und diese CD. Die CD beinhaltet eine kurze Schnellstartanleitung und das Benutzerhandbuch.

Wenn Sie die **Wiedergabetaste** auf der unteren Hälfte des Players, zwischen **Vor-** und **Rückspultaste**, drücken, können Sie die Wiedergabe pausieren und wieder einschalten.

Hier nun die Schnellstartanleitung. Legen Sie den Player vor sich hin, so dass der Tragegriff nach links zeigt. Über dem Griff, in der linken oberen Ecke, ist der eingebaute Lautsprecher.

Oben in der Mitte des Players befinden sich 3 Paare von Nach-Oben- und Nach-Unten-Tasten. Das sind von links nach rechts die Regler für **Klang**, **Lautstärke** und **Geschwindigkeit**.

Unter den Klang-, Lautstärke- und Geschwindigkeitsreglern, etwa in der Mitte des Players, finden Sie die Navigationstasten — Sie zeigen nach **OBEN**, **UNTEN**, **LINKS** und **RECHTS**. Mit ihnen können Sie sich durch die Struktur eines Buches bewegen. In der Mitte der Navigationstasten befindet sich die **Informationstaste**. Wenn Sie sie drücken, werden die aktuelle Leseposition und allgemeine Informationen zum Buch angesagt.

Links von den 4 Navigationstasten, etwa in der Mitte des Players, sind 3 weitere Tasten untereinander angeordnet. Die Erste ist die Bücherregaltaste. Mit der Bücherregaltaste und den 4 Navigationstasten können Sie sich durch die Bücher verschiedener Bücherregale bewegen. Direkt unter der **Bücherregaltaste** befindet sich die **Lesezeichentaste**, mit der Sie Lesezeichen einfügen können, um wichtige Seiten oder Absätze leicht wiederzufinden. Die unterste der 3 Tasten ist die **Auswurfaste**. Wenn Sie sie drücken, wird die CD durch den CD-Schlitz ausgeworfen.

Rechts von den 4 Navigationstasten ist die **Einschalttaste**. Um versehentliches Drücken zu verhindern, ist die Taste abgesenkt. Mit der **Einschalttaste** schalten Sie den Stratus EIN und AUS. Bitte beachten Sie, dass der Einschaltvorgang ein paar Sekunden dauert, wenn der Stratus ausgeschaltet war und dann an die Steckdose angeschlossen wird.

Unter den 4 Navigationstasten finden Sie eine Gruppe aus 4 Tasten, von denen 3 am unteren Rand des Players aufgereiht sind. Das sind, von links nach rechts, die **Rückspul-**, **Wiedergabe-** und **Vorspultaste**. Schließlich finden Sie über der **Wiedergabetaste** noch die halbmondförmige

Einschlaftaste. Links davon ist eine orangene Leuchtanzeige. Drücken Sie die Taste mehrmals, um den Zeitraum einzustellen, nach dem sich der Stratus automatisch ausschaltet.

Auf der rechten Seite des Players, etwa in der Mitte, finden Sie, von oben nach unten, einen SD-Kartenschlitz, einen USB-Anschluss und den Kopfhöreranschluss, den Sie auch für einen externen Lautsprecher nutzen können. Bitte beachten Sie, dass das Stratus-Grundmodell nicht mit SD-Kartenschlitz und USB-Anschluss versehen ist.

Auf der Rückseite des Players, etwas rechts von der Mitte, finden Sie den Netzanschluss, über den Sie den Player mit einer Steckdose verbinden können.

Auf der Vorderseite des Players ist der Schlitz des CD-ROM-Laufwerks.

Ein Buch einlegen und abspielen

Schalten Sie den Victor Reader Stratus ein, indem Sie die **Einschalt**taste gedrückt halten. Dann hören Sie einen Piepton und einen Begrüßungstext.

Legen Sie eine CD oder SD-Karte ein. Schieben Sie die CD vorsichtig in den Schlitz. Dann übernimmt der Mechanismus des Laufwerks und zieht die CD vollständig ein. Nach ein paar Sekunden sagt der Victor Reader Stratus den Titel an und beginnt mit dem Abspielen des Buches.

ANMERKUNG: Falls Sie versehentlich eine *CD verkehrt herum einlegen*, wird sie *innerhalb von 15 Sekunden ausgeworfen, ohne Schaden zu nehmen*.

Sie können Klang, Lautstärke und Geschwindigkeit einstellen, indem Sie die jeweilige Taste nach oben oder unten drücken. Die Regler für Klang, Lautstärke und Geschwindigkeit befinden sich oben in der Mitte der Geräteoberseite.

Wenn Sie sich in Ihrem Buch schnell vor- oder zurückbewegen möchten, halten Sie die **Vor-** oder **Rückspult**taste so lange gedrückt, bis Sie an der gewünschten Stelle sind, und lassen dann die Taste los. Die Wiedergabe wird in normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.

Wenn Sie eine Lesepause einlegen möchten, müssen Sie nur die **Wiedergabetaste** drücken. Um an derselben Stelle weiterzulesen, drücken Sie erneut die **Wiedergabetaste**. Bitte beachten Sie, dass Ihr Player sich nach mehr als 30 Minuten im Pausenmodus automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen, wenn er nicht an einer Steckdose angeschlossen ist.

Wenn Sie im Moment nicht weiterlesen möchten, können Sie den Player ausschalten, indem Sie die **Einschalt**taste so lange gedrückt halten, bis der Player ansagt, dass er sich abschaltet. Ihr Victor Reader Stratus merkt sich für das nächste Mal, an welcher Stelle im Buch Sie aufgehört haben.

Wenn Sie im selben Buch weiterlesen möchten, schalten Sie den Victor Reader Stratus ein, indem Sie die **Einschalt**taste gedrückt halten. Nach ein paar Sekunden hören Sie den Titel des Buches gefolgt von einem Piepton, und die Wiedergabe beginnt an dem Punkt, an dem Sie beim letzten Mal aufgehört haben, zu lesen.

Eine CD auswerfen

Zum Auswerfen einer CD drücken Sie die **Auswurf**taste. Der Victor Reader Stratus sagt „Auswurf“ und nach ein paar Sekunden schiebt der motorisierte Mechanismus die CD langsam aus dem Laufwerk.

Die Tastaturhilfe

Wenn keine CD eingelegt ist, ist die Tastaturhilfe des Stratus automatisch eingeschaltet. Wenn Sie in diesem Modus eine Taste drücken, sagt der Player eine kurze Beschreibung ihrer Funktion an. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie gerade lernen, mit dem Player umzugehen.

Damit ist die Schnellstartanleitung beendet. Nun wird das Benutzerhandbuch abgespielt.

Benutzerhandbuch

Über den Victor Reader Stratus⁴

HumanWare freut sich, den Victor Reader Stratus⁴ vorstellen zu können, den einfachen, benutzerfreundlichen digitalen Hörbuchplayer.

Der Victor Reader Stratus⁴ wurde für das Lesen in der Freizeit konzipiert, für Bestseller, Romane und Zeitschriften. Sie können leicht durch die Struktur navigieren und sich schnell zur gewünschten Information bewegen.

Über die leicht bedienbaren Funktionen können Sie das Inhaltsverzeichnis lesen und einen Abschnitt oder ein Lesezeichen gezielt anspringen.

Wir wünschen Ihnen viele angenehme Stunden, in denen Sie die vielen Facetten unseres digitalen Hörbuchplayers entdecken!

Über HumanWare

HumanWare (<http://www.humanware.com>) ist weltweiter Marktführer im Bereich Hilfsmittel für Lesebehinderte. HumanWare stellt Produkte für blinde sowie seh- und/oder lernbehinderte Menschen her. Dabei reicht HumanWares innovative Produktpalette von BrailleNote, dem führenden Notizgerät zur Nutzung in Ausbildung, Beruf und privat, bis hin zur Victor Reader Produktfamilie, den weltweit führenden Abspielgeräten für Hörbücher, dem myReader2, HumanWares einzigartigem "automatischen Lesegerät" für Sehbehinderte sowie die Vergrößerungssoftware für den Desktop SmartView Synergy SI und die GPS-basierte Orientierungshilfe Trekker Breeze.

Wichtige Sicherheitshinweise

Befolgen Sie alle Warn-, Sicherheits- und allgemeinen Hinweise, die auf dem Produkt ausgezeichnet sind.

Bevor sie den Stratus einsetzen, lesen Sie sich alle Anweisungen dieses Handbuchs aufmerksam durch.

Nutzen Sie den Stratus und stellen Sie ihn nur auf stabilen und festen Oberflächen auf.

Halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern. Tauchen Sie es keinesfalls unter Wasser.

Benutzen Sie nur die mit dem Stratus mitgelieferten Kabel.

Das Stromkabel ist ein Stecker für Geräte, die an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Betreiben Sie dieses Gerät mit den aufgedruckten Stromspezifikationen. Wenn Sie sich über die an Ihrem Ort verfügbaren Stromspezifikationen nicht sicher sind, setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder Ihrem Stromanbieter in Verbindung.

Überlassen Sie Reparaturen und Instandhaltung dafür qualifiziertem Fachpersonal. Führen Sie Reparaturen nicht selbst durch, da Sie durch das Öffnen des Geräts oder das Entfernen der Abdeckung gefährlicher Spannung oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.



Das oben abgebildete Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Nutzer auf wichtige Nutzungs- und Reparaturhinweise (Instandhaltung) aufmerksam machen, die im Handbuch zum Gerät zu finden sind.

Sicherheitshinweise zu Akkus

- Nutzen Sie den Akku nicht in der Nähe von Hitzequellen und lassen ihn nicht in die Nähe von Feuer kommen. Lagern Sie ihn nicht unter hohen Temperaturen.
- Benutzen Sie das Netzteil des Stratus nur zum Aufladen des Akkus.
- Zerlegen oder verändern Sie den Akku nicht.
- Schließen Sie die Pole nicht kurz.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser ein, und setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus.
- Schlagen Sie nicht gegen den Akku und werfen Sie nicht damit.
- Schlagen Sie nicht mit scharfen Gegenständen oder einem Hammer gegen den Akku, und durchstechen Sie ihn keinesfalls.
- Löten Sie nicht am Akku.
- Kehren Sie den positiven und negativen Pol nicht um.
- Benutzen Sie den Akku nicht für andere als die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke.
- Vorsicht! Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akkutyp eingesetzt wird
- Akkuentorgung: Schicken Sie den Akku an HumanWare zurück, oder befolgen die vor Ort üblichen Bestimmungen, oder bei Krankenhäusern deren Entsorgungsverfahren
- Wenn der Akku ausläuft und Flüssigkeit in Ihre Augen kommt, reiben Sie sich keinesfalls die Augen. Spülen Sie sich die Augen stattdessen mit klarem, fließendem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt und es zum Hautkontakt kommt, spülen Sie die betreffende Stelle sofort mit klarem, fließendem Wasser, um Verletzungen zu vermeiden.

Hinweis für medizinische Geräte (falls zutreffend)

Der folgende Text ist nur relevant, wenn Sie den Stratus als medizinisches Gerät erworben haben. Dieses Produkt ist zum Schutz mit einem Stecker mit dreiadrigem Erdungsdraht ausgestattet. Dieser Stecker verfügt über einen dritten Kontakt (Schutzkontakt) und darf nur in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden. Kontaktieren Sie, falls nötig, einen Elektriker, um Ihre Steckdosen gegen geerdete Steckdosen auszutauschen.

Dieses Produkt sollte mit dem dafür vorgesehenen externen Netzteil betrieben werden, um der Norm IEC 60601-1 zu entsprechen. Folgender Hersteller und Modell wird für ein Netzteil empfohlen:

Hersteller: GlobTek, Inc.
Modellnummer: GTM9100P10012

Elektromagnetische Verträglichkeit: Die Nutzung anderer Zubehörteile und Kabel als der von HumanWare empfohlenen kann zu erhöhten Emissionen oder einer verringerten Immunität des Stratus führen.

Aufstellung von Geräten: Der Stratus darf nicht in der Nähe von anderen Geräten oder eines Geräteturms verwendet werden.

Der Kopfhöreranschluss darf nur über Kleinspannungsstromkreise oder mithilfe von Medical Grade-isolierten Geräten angeschlossen werden.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen ausreichenden Schutz gegen schädliche Störungen bei Wohnungsinstallationen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und kann, falls es nicht gemäß der Installationshinweise aufgestellt und verwendet wird, schädliche Störungen bei der Kommunikation per Funk verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was Sie durch Aus- und wieder Einschalten des Geräts überprüfen können, können Sie die Störungen durch die Umsetzung einer oder mehrerer Maßnahmen wie folgt beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die über einen anderen Stromkreis als der Empfänger versorgt wird.
- Setzen Sie sich für weitere Hilfe mit Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsichttechniker in Verbindung.

Hinweis für Kanada

Dieser digitale Apparat der Klasse B erfüllt alle Voraussetzungen der kanadischen Richtlinien für störungsverursachende Geräte (Canadian Interference-Causing Equipment regulations).

Entsorgung

Nach dem Ende des Lebenszyklus des Victor Reader Stratus müssen seine eingebauten Einzelteile gemäß der in Ihrem Land geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

Der Victor Reader Stratus beinhaltet keine Schadstoffe. Schicken Sie das Gerät zur fachgerechten Entsorgung an HumanWare zurück, oder befolgen Sie die üblichen Bestimmungen, oder bei Krankenhäusern deren geltende Verfahren zur Entsorgung.

Inhalt

ERSTE SCHRITTE MIT DEM VICTOR READER STRATUS⁴	I
ÜBER DEN VICTOR READER STRATUS⁴	IV
1. BESCHREIBUNG DES VICTOR READER STRATUS⁴ M	1
1.1 Verpackungsinhalt	1
1.2 Abspielmöglichkeiten beim Stratus ⁴ M	1
1.3 Optionale Tastaturabdeckung	1
1.4 Aussehen des Victor Reader Stratus	3
1.4.1 Die Oberseite des Players	3
1.4.2 Die linke Seite des Players	4
1.4.3 Die rechte Seite des Players	4
1.4.4 Die Vorderseite des Players	4
1.4.5 Die Rückseite des Players	4
1.5 Akku aufladen	4
1.6 Ein-/Ausschalten	5
1.7 Eine CD einlegen oder auswerfen	5
1.8 Eine SD-Karte einlegen oder entfernen	5
1.8.1 Gesprochener SD-Kartentitel	6
1.9 Automatische Buchsuche	6
1.10 Struktur der Bücherregale	6
1.11 Weitere vorgegebene Dateinamen	8
2. GRUNDFUNKTIONEN	9
2.1 Klangeinstellungen	9
2.2 Wiedergabe/Anhalten	9
2.3 Vor- und Zurückspulen	9
2.4 Die Tastaturhilfe	9
3. NAVIGATIONSFUNKTIONEN	10
3.1 Beschreibung der Tasten	10
3.1.1 Navigation rückgängig machen	10
3.2 Bücherregal	10
3.3 Zeitsprung-Navigationsmodus	11
3.4 10-Seiten-Sprung	11
3.5 Navigationselemente im Sprachausgabenmodus	11
3.6 Buchstabiermodus im Bücherregal Text	11
3.7 Elemente überspringen	11
3.8 Benutzerhandbuch — Bücherregaltaste (gedrückt halten)	12
3.9 Bücherregalnavigation — Bücherregaltaste	12
3.9.1 Ordernavigation in Bücherregalen	12
3.10 Bücher löschen - Auswurf-taste (gedrückt halten)	12
3.11 Information	12
3.11.1 Verfügbare Informationen	12
4. ERWEITERTE FUNKTIONEN	13

4.1	Schlafmodus und Zeitansage	13
4.2	Datum und Uhrzeit einstellen	13
4.3	Lesezeichen	14
4.3.1	Lesezeichen setzen	14
4.3.2	Lesezeichen anspringen	14
4.3.3	Lesezeichen löschen	14
5.	STRUKTUR UND MERKMALE DER BÜCHERREGALE	15
5.1	Hörbücher.....	15
5.1.1	Struktur der Hörbücher	15
5.1.2	Eigenschaften von Hörbüchern.....	15
5.2	Andere Bücher.....	16
5.2.1	Struktur für andere Bücher.....	16
5.2.2	Eigenschaften von anderen Büchern.....	16
5.3	Bücherregal Musik.....	17
5.3.1	Struktur für Musik.....	17
5.3.2	Eigenschaften von Musik.....	17
5.3.3	Playlists.....	17
5.3.4	Ansage von Ordner- und Dateinamen	18
5.4	Bücherregal Podcasts	18
5.4.1	Podcaststruktur.....	18
5.4.2	Eigenschaften von Podcasts.....	18
5.5	Bücherregal Text	18
5.5.1	Struktur der Textdateien	18
5.5.2	Eigenschaften von Textdateien.....	19
5.5.3	Überschriftsnavigation in HTML-/XML-/DOCX-Dateien	19
6.	DAS KONFIGURATIONSMENÜ.....	20
6.1	Liste der Menüs und Menüeinträge	20
6.1.1	Wiedergabe	21
6.1.2	Überspringen	21
7.	AKKUWECHSEL	22
7.1	Alten Akku entfernen	22
7.2	Neuen Akku einlegen	22
8.	UPDATE DER STRATUS-SOFTWARE.....	23
9.	PROBLEMBEHANDLUNG	24
9.1	Buchnavigation.....	24
9.2	Der Akku und der Ladevorgang.....	24
9.3	CDs	25
9.4	Allgemeines.....	26
10.	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.....	27
11.	TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	28
12.	HERSTELLERGARANTIE	29

13.	ENDBENUTZERLIZENZVERTRAG	30
14.	ANHANG 1 - FEHLERMELDUNGEN.....	31

1. Beschreibung des Victor Reader Stratus⁴ M

1.1 Verpackungsinhalt

Die Verpackung beinhaltet folgende Einzelteile: ein Victor Reader Stratus⁴ M, eventuell eine Tastaturabdeckung (nicht bei allen Geräten), die abgenommen werden kann, um die Navigationstasten des Players freizugeben, ein Netzteil, eine Plastiktüte mit der Dokumentation und diese CD. Die CD beinhaltet eine kurze Schnellstartanleitung und das Benutzerhandbuch. Wenn Sie möchten, können Sie Benutzerhandbuch und Schnellstartanleitung auch ausdrucken. Schließen Sie den Victor Reader Stratus an eine Steckdose an, um den Akku aufzuladen, bevor Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Während des Ladevorgangs können Sie den Stratus benutzen.

Sollte einer der genannten Gegenstände in Ihrer Verpackung fehlen, wenden Sie sich bitte an ihren Händler oder direkt an HumanWare:

Gebührenfrei: 1 888 723-7273 (Kanada & USA)

Telefon: 1 (819) 471-4818

Fax: 1 (819) 471-4828

Website: www.humanware.com

Nordamerika:

In der Verpackung befindet sich außerdem eine Karte, die Sie ausfüllen können, wenn Sie eine Erweiterung Ihrer Grundgarantie erwerben möchten. Wenn die Karte vorhanden ist und Sie an einer Garantieverweiterung interessiert sind, beachten Sie bitte, dass die Karte innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet werden muss. Falls Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Karte haben oder nähere Informationen wünschen, kontaktieren Sie bitte HumanWare:

E-Mail: us.info@humanware.com

1.2 Abspielmöglichkeiten beim Stratus⁴ M

Mit dem Player Stratus M (Multimedia) können Inhalte von CD, SD-Karte und USB-Flashspeicher abgespielt werden. Eventuell verfügt Ihr Stratus M über eine Zusatzfunktion, mit der er über das Internet auf Bücher zugreifen kann, entweder über WLAN- oder 3G-Verbindung. Einige Stratus M-Modelle haben kein CD-Laufwerk. Sollte das bei Ihrem Stratus M der Fall sein, sind Anweisungen zu CDs oder dem CD-Laufwerk für dieses Gerät nicht relevant. Um festzustellen, welches Modell Sie haben, drücken Sie die **Informationstaste**. Wenn nicht anders angegeben, werden in diesem Benutzerhandbuch alle Stratus⁴-M-Modelle als „Stratus“ bezeichnet.

1.3 Optionale Tastaturabdeckung

Eventuell ist Ihr Player mit einer Tastaturabdeckung versehen. Sie verhindert das versehentliche Drücken der Navigationstasten bei Nutzern, die damit nicht im Buch navigieren möchten. Wenn Sie alle Navigationsfunktionen Ihres Victor Reader Stratus nutzen möchten, können Sie die Abdeckung abnehmen.

Die Tastaturabdeckung ist an den 4 Ecken des Players befestigt und ist an jeder Ecke mit einem Verschluss ausgestattet, durch den sie fixiert wird.

Die Tastaturabdeckung verhindert die Betätigung der folgenden Tasten: Bücherregaltaste, Lesezeichentaste, 4 Pfeiltasten zur Navigation und Informationstaste.

Wenn Sie die Tastaturabdeckung abnehmen möchten:

-Halten Sie den Player mit der linken Hand am Tragegriff fest.

-Legen Sie die rechte Hand auf die rechte obere Ecke der Abdeckung. Der Verschluss ist auf der Mitte der Ecke.

-Greifen Sie mit dem rechten Zeigefinger unter den Verschluss.

-Benutzen Sie Ihren Daumen als Hebel an der Seite des Players und drücken Sie, bis sich der Verschluss vom Player weg zur Seite ziehen lässt.

-Auf dieselbe Weise heben Sie vorsichtig den Verschluss an der rechten unteren Ecke der Abdeckung an.

-Wenn die beiden Ecken angehoben sind, müssten Sie die Abdeckung schon abnehmen können. Falls nötig, lösen Sie auch noch die linke untere Ecke und nehmen die Tastaturabdeckung ab.

Wenn Sie die Tastaturabdeckung wieder befestigen möchten, müssen Sie sie genau über den Stratus legen und sicherstellen, dass sich der Tragegriff des Stratus und der der Abdeckung überlappen.

Dann drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis alle 4 Ecken einrasten.

1.4 Aussehen des Victor Reader Stratus

1.4.1 Die Oberseite des Players

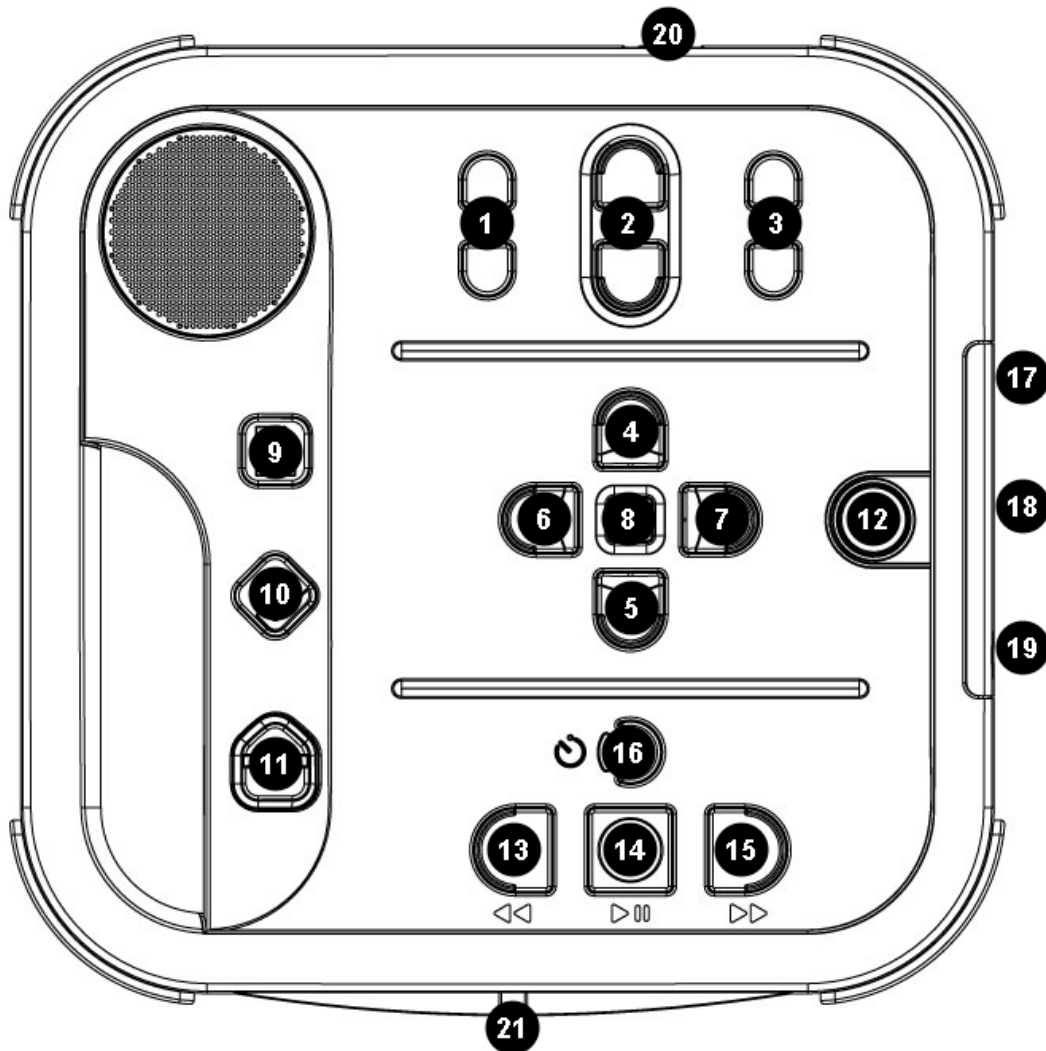


Figure 1: Stratus-Tasten

Stratus-Tasten und -Funktionen:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Klang | 8. Information | 15. Vorspulen |
| 2. Lautstärke | 9. Bücherregal | 16. Einschlaf-taste |
| 3. Geschwindigkeit | 10. Lesezeichen | 17. SD-Kartenschlitz |
| 4. Navigation: OBEN | 11. Auswurf | 18. USB-Anschluss |
| 5. Navigation: UNTEN | 12. Ein/Aus | 19. Kopfhörer |
| 6. Navigation: LINKS | 13. Rückspulen | 20. Netzanschluss |
| 7. Navigation: RECHTS | 14. Wiedergabe | 21. CD-Schlitz |

Der eingebaute Lautsprecher befindet sich in der linken oberen Ecke der Oberseite.

Oben in der Mitte des Players befinden sich 3 Paare von Nach-Oben- und Nach-Unten-Tasten. Dies sind, von links nach rechts, die Regler für **Klang**, **Lautstärke** und **Geschwindigkeit**.

Unter den Klang-, Lautstärke- und Geschwindigkeitsreglern, etwa in der Mitte des Players, finden Sie die Navigationstasten — Sie zeigen nach **OBEN**, **UNTEN**, **LINKS** und **RECHTS**. Mit ihnen können Sie sich ganz einfach durch die Struktur eines Buches bewegen. In der Mitte der Navigationstasten befindet sich die **Informationstaste**. Wenn Sie sie drücken, werden die aktuelle Leseposition und allgemeine Informationen zum Buch angesagt.

Links von den 4 Navigationstasten, etwa in der Mitte des Players, sind 3 weitere Tasten untereinander angeordnet. Die erste ist die **Bücherregaltaste**. Befinden sich mehrere Bücher auf einer CD, so können Sie mit der **Bücherregaltaste** und der **Rechts-/Linkstaste** das gewünschte Buch auswählen. Direkt unter der **Bücherregaltaste** befindet sich die **Lesezeichtaste**, mit der Sie Lesezeichen einfügen können, um wichtige Seiten oder Absätze leicht wiederzufinden. Drücken Sie die **Lesezeichtaste** mehrmals, um auszuwählen, ob Sie Lesezeichen einfügen, anspringen oder entfernen möchten. Die unterste der 3 Tasten ist die **Auswurfaste**. Wenn Sie sie drücken, wird die CD durch den CD-Schlitz ausgeworfen.

Rechts von den 4 Navigationstasten ist die **Einschalttaste**. Um versehentliches Drücken zu verhindern, ist die Taste abgesenkt. Mit der **Einschalttaste** schalten Sie den Stratus EIN und AUS.

Unter den 4 Navigationstasten finden Sie eine Gruppe aus 4 Tasten, von denen 3 am unteren Rand des Players aufgereiht sind. Das sind, von links nach rechts, die **Rückspul-**, **Wiedergabe-** und **Vorspultaste**. Schließlich finden Sie über der **Wiedergabetaste** noch die halbmondförmige **Einschlafaste**. Links davon ist eine orangene Leuchtanzeige. Mit der **Einschlafaste** können Sie sich die Uhrzeit ansagen lassen oder den Schlafmodus aktivieren. Drücken Sie die Taste mehrmals, um sich die Uhrzeit ansagen zu lassen oder den Zeitraum einzustellen, nach dem sich der Player automatisch ausschaltet.

1.4.2 Die linke Seite des Players

Auf der linken Seite des Players finden Sie den Tragegriff und den eingebauten Lautsprecher.

1.4.3 Die rechte Seite des Players

Auf der rechten Seite des Players, etwa in der Mitte, finden Sie, von oben nach unten, einen SD-Kartenschlitz, einen USB-Anschluss und den Kopfhöreranschluss, den Sie auch für einen externen Lautsprecher nutzen können.

1.4.4 Die Vorderseite des Players

Auf der Vorderseite des Players finden Sie den Schlitz des CD-ROM-Laufwerks.

1.4.5 Die Rückseite des Players

Auf der Rückseite des Players, etwas rechts von der Mitte, finden Sie den Netzanschluss. Über ihn können Sie den Player mit einer Steckdose verbinden, um den Akku aufzuladen.

1.5 Akku aufladen

Der Akku kann etwa 300 Mal wieder aufgeladen werden. Unter Normalbedingungen können Sie mit einem voll aufgeladenen Akku bis zu 10 Stunden lang hintereinander DAISY-Bücher abspielen. In folgenden Fällen kann die Spielzeit jedoch geringer sein:

Wenn der Akku weniger als 4 Stunden lang aufgeladen wurde.

Wenn die Navigationsfunktionen sehr häufig genutzt wurden.

Nicht-DAISY-CDs verbrauchen mehr Strom und laufen im Akkubetrieb etwa 3 Stunden lang.
Bei hoher Lautstärke oder hoher Lesegeschwindigkeit.
Wenn der Player mit dem Internet verbunden wird.

Wenn der Player an einer Steckdose angeschlossen ist, lädt sich der Akku automatisch auf. Währenddessen können Sie den Player weiter nutzen. Zum Laden des Akkus verbinden Sie den Player einfach mit dem Stromnetz. Ist er eingeschaltet, wird Ihnen durch ein kurzes Tonsignal bestätigt, dass der Player am Stromnetz angeschlossen ist. Sie hören das Tonsignal erneut, wenn Sie das Kabel wieder aus der Steckdose ziehen. Der Ladevorgang funktioniert aber auch, wenn der Player ausgeschaltet ist.

Zum Wechseln des Akkus lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch.

ANMERKUNG: Wenn der Player nicht an einer Steckdose angeschlossen ist und sich länger als 30 Minuten im Pausenmodus befindet, schaltet er sich automatisch ab, um den Akku zu schonen.

1.6 Ein-/Ausschalten

Schalten Sie den Player ein, indem Sie die **Einschalttaste** gedrückt halten. Dann hören Sie einen Piepton und einen Begrüßungstext.

Schalten Sie den Player aus, indem Sie die **Einschalttaste** erneut gedrückt halten. Dann hören Sie 2 Pieptöne, die anzeigen, dass sich der Player ausschaltet. Bitte beachten Sie, dass der Einschaltvorgang ein paar Sekunden dauert, wenn der Stratus ausgeschaltet war und dann an die Steckdose angeschlossen wird.

Die **Einschalttaste** verhält sich folgendermaßen:

- Der Player ist eingeschaltet. Die **Einschalttaste** leuchtet grün, unabhängig davon, ob der Akku aufgeladen wird.
- Der Player ist ausgeschaltet, am Stromnetz angeschlossen und der Akku wird aufgeladen. Die **Einschalttaste** blinkt blassrot.
- Der Player ist ausgeschaltet, am Stromnetz angeschlossen und der Akku wird nicht aufgeladen. Die **Einschalttaste** leuchtet blassrot.
- Der Player ist ausgeschaltet und nicht am Stromnetz angeschlossen. Die **Einschalttaste** leuchtet nicht.

1.7 Eine CD einlegen oder auswerfen

Schieben Sie Ihre CD in den Schlitz an der Vorderseite des Players. Dann drücken Sie die CD vorsichtig hinein. Nun übernimmt der Mechanismus des Laufwerks und zieht die CD vollständig ein. Nach ein paar Sekunden sagt der Stratus den Titel des Buches an. Drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um das Buch abzuspielen. Wenn Sie eine CD versehentlich verkehrt herum einlegen, wird sie nach kurzer Zeit ausgeworfen, ohne Schaden zu nehmen.

Zum Auswerfen einer CD drücken Sie die **Auswurfaste** in der linken unteren Ecke. Der motorisierte Mechanismus schiebt die CD langsam aus dem Laufwerk.

*ANMERKUNG: Die **Auswurfaste** funktioniert nur, wenn der Victor Reader eingeschaltet ist.*

1.8 Eine SD-Karte einlegen oder entfernen

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte einlegen oder entfernen:

Legen Sie den Player auf einer glatten Oberfläche so vor sich hin, dass der Tragegriff nach unten links zeigt. Der SD-Kartenschlitz ist etwa in der Mitte der rechten Seite.

Halten Sie die SD-Karte in der rechten Hand.

-Eine Ecke der SD-Karte hat einen 45-Grad-Einschnitt. Die eingeschnittene Ecke gehört nach oben links. Die Verbindungsteile der Karte, die vielen kleinen Rillen, sind auf der linken Seite, unter der Karte. Diese Seite schieben Sie in den SD-Kartenschlitz des Players. Wenn die Karte nicht richtig gedreht ist, kann sie nicht eingeschoben werden.

Schieben Sie die Karte vorsichtig nach unten in den Schlitz, bis sie mit einem Klick einrastet. Wenden Sie aber keine übermäßige Kraft auf. Zum Einschieben der SD-Karte müssen Sie nur leichten Druck ausüben.

-Zum Entfernen der Karte drücken Sie die Oberseite nach unten, bis die Karte mit einem Klick freigegeben wird, und ziehen sie dann heraus.

Beachten Sie, dass SD-Karten einen Schreibschutz haben, der versehentliches Löschen von Inhalten verhindern kann. Wenn der Schreibschuttschieber zu den Verbindungsteilen hin geschoben ist, ist die SD-Karte nicht schreibgeschützt, d. h., dass Inhalte hinzugefügt oder gelöscht werden können. Wenn der Schieber von den Verbindungsteilen weg geschoben ist, ist die SD-Karte schreibgeschützt, d. h., dass keine Inhalte hinzugefügt oder gelöscht werden können.

1.8.1 *Gesprochener SD-Kartentitel*

Sie dürfen keine Beschriftungen in Punkt- oder Schwarzschrift auf SD-Karten anbringen, da Sie sonst den Stratus beschädigen könnten. Damit Sie Ihre SD-Karten trotzdem auseinanderhalten können, bietet der Stratus die Möglichkeit eines gesprochenen Titels. Dieser wird im Hauptverzeichnis der SD-Karte in einer Textdatei mit dem vorgegebenen Namen \$VRLabel.txt gespeichert. Diese Datei können Sie z. B. mit dem Microsoft Editor erstellen. Immer wenn Sie dann die SD-Karte wieder einlegen oder den Stratus einschalten, sucht er nach der Titeldatei. Wird sie gefunden, sagt der Stratus den Inhalt an. Beachten Sie, dass der Titel nicht länger sein darf als 50 Zeichen. Der Stratus ignoriert alle über die ersten 50 hinausgehenden Zeichen in der Titeldatei. Eine Titeldatei ist nicht erforderlich. Wenn Sie keine automatische Titelanzeige für Ihre SD-Karte benötigen, müssen Sie die Datei nicht anlegen. Dieser Titel hat nichts damit zu tun, was unter Bezeichnung erscheint, wenn Sie sich die Eigenschaften der SD-Karte in Windows anzeigen lassen.

1.9 Automatische Buchsuche

Wenn der Stratus eingeschaltet ist, sucht er das Buch, in dem zuletzt gelesen wurde. Wenn er es nicht findet, öffnet er das erste Buch, das er auf den verfügbaren Medien findet. Sie werden in folgender Reihenfolge durchsucht: SD-Karte, USB, interner Speicher und CD.

1.10 Struktur der Bücherregale

Der Stratus kann verschiedene Buchtypen erkennen, die jeweils in eigenen Ordnerstrukturen, den Bücherregalen, gespeichert werden. Um ein Bücherregal auszuwählen, drücken Sie die **Bücherregaltaste** mehrmals. Mit der **Links-** oder **Rechtstaste** bewegen Sie sich durch die Bücherregale. Nach dem letzten Bücherregal beginnt die Liste wieder von vorne. Auf der SD-Karte oder USB-Quelle wird jedes Bücherregal in einem vorgegebenen Ordner abgelegt, dessen Name mit „\$VR“ beginnt. In jeden dieser vorgegebenen Ordner (Bücherregale) kann der Nutzer Unterordner mit einzelnen Büchern oder Dateigruppen einfügen. Sie können auch andere Dateien und Ordner auf der SD-Karte speichern, aber nur die Inhalte der vorgegebenen Ordner mit \$VR werden in den Stratus-Bücherregalen angezeigt. Achtung: Wenn Sie eine nicht schreibgeschützte SD-Karte einlegen, legt der Stratus automatisch die \$VR-Ordner an. Struktur und Nutzung der Bücherregale sind folgendermaßen festgelegt:

Bücherregal: Hörbücher (Ordner \$VRDTB).

Buchtypen: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 EPUB

Nutzung: Speichern Sie Ihre gesamten DAISY- oder NISO-Bücher in getrennten Unterordnern dieses Ordners. Wählen Sie mit der **Oben-** oder **Untentaste** die Navigation nach Büchern oder

Ordern und gehen dann mit der **Links-** oder **Rechtstaste** auf der gewählten Ebene zum gewünschten Buch, das Sie mit der **Wiedergabetaste** auswählen. In diesem Bücherregal werden Lesezeichen sowie die aktuelle Leseposition für jedes Buch getrennt gespeichert.

Bücherregal: Andere Bücher (Ordner \$VROtherBooks).

Buchtypen: Nicht-DAISY- oder Nicht-NISO-Hörbücher in einem der vom Stratus unterstützten Audioformate.

Nutzung: Speichern Sie jedes Buch mit all seinen Dateien und eventuell Unterordnern in einem eigenen Unterordner dieses Ordners. Bücher, die nur aus einer Datei bestehen, können auch direkt im Hauptverzeichnis abgelegt werden. Wählen Sie mit der **Oben-** oder **Untentaste** die Navigation nach Büchern oder Ordnern und gehen dann mit der **Links-** oder **Rechtstaste** auf der gewählten Ebene zum gewünschten Buch, das Sie mit der **Wiedergabetaste** auswählen. In diesem Bücherregal werden Lesezeichen so wie die aktuelle Leseposition für jedes Buch getrennt gespeichert. Die Wiedergabe stoppt am Ende der letzten Datei jedes Buches.

Bücherregal: Musik (Ordner \$VRMusic).

Buchtypen: Playlists (nur M3U) und Dateien in einem der vom Stratus unterstützten Audioformate.

Nutzung: Ein Musikbuch ist entweder eine Playlist oder die gesamte Musikstruktur (bezeichnet als Gesamtmusikbuch). In diesem Bücherregal werden Lesezeichen so wie die aktuelle Leseposition für jedes Buch getrennt gespeichert. Mit der **Links-** oder **Rechtstaste** können Sie sich im Bücherregal Musik durch die einzelnen Musikbücher bewegen. Das Gesamtmusikbuch besteht aus den Ordnern und Unterordnern mit Audiodateien. Eine mögliche Struktur wäre z. B. Genre, Künstler, Album und Tracks. Zur Navigation im Gesamtmusikbuch wählen Sie mit der **Oben-** oder **Untentaste** die Navigation nach Büchern oder Ordnern und gehen dann mit der **Links-** oder **Rechtstaste** auf der gewählten Ebene zum gewünschten Buch. Nach der letzten Datei eines Ordners wird die Wiedergabe mit der ersten Datei des nächsten Ordners fortgesetzt.

Bücherregal: Podcasts (Ordner \$VRPodcasts)

Buchtypen: Dateien in einem der vom Stratus unterstützten Audioformate.

Nutzung: Jede Podcastdatei wird als abgeschlossenes Buch behandelt, sodass Sie sich in diesem Bücherregal mit der **Links-** oder **Rechtstaste** durch die Bücher bewegen müssen. Die Dateien können sich auch in Unterordnern befinden. In diesem Fall wählen Sie mit der **Oben-** oder **Untentaste** die Navigation nach Büchern oder Ordnern. Lesezeichen so wie die aktuelle Leseposition werden für jedes Buch (jede Datei) getrennt gespeichert. Die Wiedergabe stoppt am Ende jedes Buches (jeder Datei).

Bücherregal: Andere Audiodateien

Buchtyp: Audio (CDA-Dateien) oder Daten (Dateien in einem der vom Stratus unterstützten Audioformate).

Nutzung: kommerzielle Audio- oder MP3-CDs. Sie können sich mit der **Links-** oder **Rechtstaste** durch die Dateien bewegen. Wählen Sie mit der **Oben-** oder **Untentaste** die Navigation nach Büchern oder Ordnern und bewegen sich dann mit der **Links-** oder **Rechtstaste** auf der gewählten Ebene.

Bücherregal: Text (Ordner \$VRText).

Buchtypen: Textdateien (BRA, BRF, DOCX, HTML, RTF, SES3, TXT, XML)

Nutzung: Jede Textdatei wird als abgeschlossenes Buch behandelt, sodass Sie sich in diesem Bücherregal mit der **Links-** oder **Rechtstaste** durch die Dateien bewegen müssen. Die Dateien können sich auch in Unterordnern befinden. In diesem Fall wählen Sie mit der **Oben-** oder **Untentaste** die Navigation nach Büchern oder Ordnern. Lesezeichen so wie die aktuelle Leseposition werden für jedes Buch (jede Datei) getrennt gespeichert. Die Wiedergabe stoppt am Ende jedes Buches (jeder Datei). Anmerkung: Wenn eine Brailledatei (.BRF) nicht korrekt wiedergegeben wird, überprüfen Sie im Konfigurationsmenü (**Informationstaste** gedrückt halten), ob die richtige Braille-Übersetzungstabelle ausgewählt ist.

Anmerkung: Die Groß- und Kleinschreibung in Ordnernamen wird zwar zur besseren Lesbarkeit angezeigt, ist aber nicht erforderlich.

1.11 Weitere vorgegebene Dateinamen

Eventuell legt der Stratus weitere Dateien auf der SD-Karte an, die mit „\$VR“ beginnen. Wenn Sie diese Dateien ändern oder entfernen, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

2. Grundfunktionen

2.1 Klangeinstellungen

Die Regler für **Klang**, **Lautstärke** und **Geschwindigkeit** haben jeweils eine **Nach-Oben**- und eine **Nach-Unten**taste. Ein Piepton zeigt jeweils die höchste und niedrigste Einstellung an. Wenn das Buch gerade nicht abgespielt wird (oder die Tastaturabdeckung befestigt ist), sagt der Victor Reader die Einstellung an. Bei Klang und Geschwindigkeit wird außerdem durch einen Piepton die Normal- oder 0-Position angezeigt. Das ist entweder normaler Klang oder normale Geschwindigkeit.

2.2 Wiedergabe/Anhalten

Um ein Buch abzuspielen, drücken Sie die **Wiedergabetaste**.

Um wieder zu stoppen, drücken Sie erneut die **Wiedergabetaste**.

2.3 Vor- und Zurückspulen

Mit diesen Tasten können Sie sich schnell vor- oder zurückbewegen. Dann hören Sie die Aufnahme schneller.

Halten Sie die **Vor**- oder **Rückspultaste** so lange gedrückt, bis Sie am gewünschten Punkt ankommen. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto schneller wird vor- oder zurückgespult. Während Sie die Taste gedrückt halten, machen Sie alle paar Sekunden einen Zeitsprung. Die Sprünge sind 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, usw. Der größte Sprung beträgt 5 Minuten. Der Stratus sagt die Zeitsprünge an und spielt zwischen 2 Sprüngen ein kurzes Stück in Normalgeschwindigkeit ab. Wenn Sie die **Vor**- oder **Rückspultaste** einmal drücken, gehen Sie 5 Sekunden vor oder zurück oder springen bei Textdateien eine Zeile vor oder zurück.

2.4 Die Tastaturhilfe


Über die Tastaturhilfe erfahren Sie die Funktionen der einzelnen Tasten des Stratus. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie gerade lernen, mit dem Player umzugehen.

Wenn kein Buch vorhanden ist, ist die Tastaturhilfe des Stratus automatisch eingeschaltet. Auch wenn ein Buch vorhanden ist, können Sie die Tastaturhilfe einschalten, indem Sie die **Einschalttaste** drücken. Um die Tastaturhilfe wieder auszuschalten, drücken Sie erneut die **Einschalttaste**.

Ist die Tastaturhilfe eingeschaltet, so wird die Funktion jeder Taste, die Sie drücken, angesagt.

3. Navigationsfunktionen

3.1 Beschreibung der Tasten

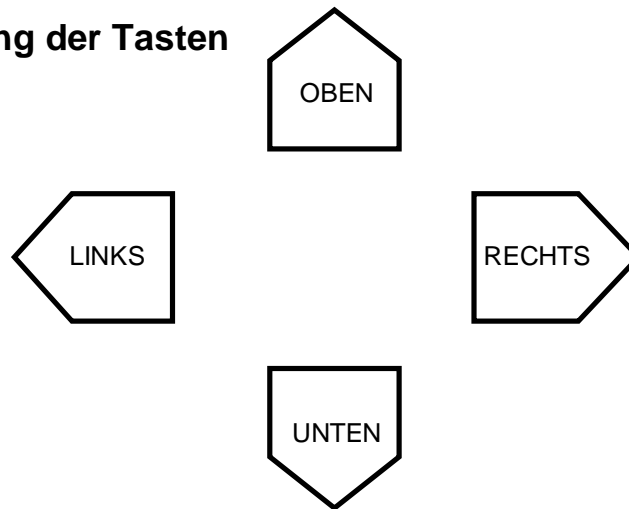

Unter den Reglern für **Klang**, **Lautstärke** und **Geschwindigkeit** finden Sie die 4 Navigationstasten: Nach **Oben**, **Unten**, **Links** und **Rechts**. Mit ihnen können Sie eine Navigationsebene auswählen, auf der Sie dann zwischen den Teilbereichen des Buches wechseln, um die gewünschte Information schnell anzuspriegen.

Navigationsbeispiele: Ebene 1 (Kapitel), Ebene 2 (Abschnitt), Seite, usw. Da die Navigationselemente vom Buchhersteller festgelegt werden, können sie sich von Buch zu Buch unterscheiden.

Zunächst wählen Sie ein Navigationselement aus. Drücken Sie die **Oben-** oder **Untentaste** mehrmals hintereinander, bis das gewünschte Element angesagt wird. Das zuletzt angesagte Element ist ausgewählt.

Dann bewegen Sie sich um ein Element vorwärts mit der **Rechtstaste** oder rückwärts mit der **Linkstaste**, bis Sie das gewünschte Element erreicht haben. Das zuletzt angesagte Element ist ausgewählt. Dann wird vom gewählten Buchelement aus gelesen.

3.1.1 Navigation rückgängig machen

Mit der Funktion RÜCKGÄNGIG MACHEN können Sie eine Aktion umkehren, die Sie durch versehentliches Drücken der Navigationstaste nach **Links** oder **Rechts** ausgelöst haben. Drücken Sie z. B. versehentlich Pfeil **Rechts** und springen zum nächsten Buchelement, können Sie Pfeil **Links** drücken, um so die Aktion rückgängig zu machen und zur letzten Position zurückzukehren. Genauso können Sie Pfeil **Rechts** drücken, um versehentliches Drücken von Pfeil **Links** rückgängig zu machen. ANMERKUNG: Um eine ungewünschte Aktion rückgängig zu machen, müssen Sie innerhalb von 10 Sekunden nach deren Auslösen die Gegentaste drücken.

3.2 Bücherregal

Wenn sich mehrere Titel auf Ihrem Medium befinden, können Sie durch Drücken der **Bücherregaltaste** die Buchliste aufrufen. Mit der **Links-** oder **Rechtstaste** können Sie sich von Titel zu Titel bewegen, um ein Buch auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **Wiedergabetaste**. Dann spielt der Stratus das gewählte Buch ab.

3.3 Zeitsprung-Navigationsmodus

Sie können die Zeitsprungnavigation mit der **Oben-** oder **Untentaste** aktivieren.

Drücken Sie die **Oben- oder Untentaste** zur Auswahl der Navigationsebene, bis der Stratus „Zeitsprung“ und ein *Intervall* ansagt. Das *Zeitsprungintervall kann im Bereich* Navigation und Wiedergabe des Konfigurationsmenüs (**Informationstaste** gedrückt halten) auf 1, 5, 10 oder 30 Minuten eingestellt werden.

3.4 10-Seiten-Sprung

Mit der **Rechts-** und **Linkstaste** können Sie sich in 10-Seiten-Schritten bewegen, um eine bestimmte Seite schnell anzuspringen.

Zur Auswahl der Seitennavigation drücken Sie die **Oben-** oder **Untentaste**, bis „Seite“ angesagt wird.

Dann halten Sie die **Vor-** oder **Rückspultaste** gedrückt. Der Victor Reader Stratus springt nun in 10-Seiten-Schritten vor oder zurück.

Wenn Sie in der Nähe der gewünschten Seite sind, lassen Sie die Taste los. Nun können Sie sich durch einmaliges Drücken der **Vor-** oder **Rückspultaste** um eine Seite weiterbewegen. Drücken Sie die Taste so oft nacheinander, bis Sie bei der gewünschten Seite angekommen sind. Gibt es in Ihrem Buch keine Seitennavigation, so wird dieser Punkt auch nicht angesagt, wenn Sie die **Oben-/Untentaste** drücken.

3.5 Navigationselemente im Sprachausgabenmodus

Im Sprachausgabenmodus bietet der Stratus zusätzliche Navigationselemente für Texte an, die Sie auch mit den Navigationstasten nach **Oben/Unten** anspringen können. Das sind die Textelemente: Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Wort, Buchstabieren und Zeichen. Beachten Sie, dass bei einer Textsuche noch ein weiteres Navigationselement hinzukommt, sodass Sie den nächsten oder vorherigen Suchbegriff suchen können. Die Elemente Bildschirm und Zeile wurden willkürlich auf 25 Zeilen pro Bildschirm und maximal 80 Zeichen pro Zeile festgelegt. Wie bei den anderen Navigationselementen bewegen Sie sich mit den Tasten nach **Links/Rechts** zwischen den Elementen der gewählten Ebene. Beachten Sie, dass das Element Bildschirm nur verfügbar ist, wenn in einem Buch keine Seiten definiert sind.

3.6 Buchstabiermodus im Bücherregal Text

Den Buchstabiermodus können Sie mit den Navigationstasten nach **Oben/Unten** auswählen. Sie finden ihn zwischen den Navigationselementen Wort und Zeichen. Mit den Tasten nach **Links/Rechts** bewegen Sie sich Wort für Wort durch den Text. Der Stratus sagt dann jedes Wort an und buchstabiert es. Dabei werden Großbuchstaben angesagt, und die Wörter werden immer in Normalgeschwindigkeit buchstabiert, unabhängig davon, welche Geschwindigkeit eingestellt ist.

3.7 Elemente überspringen

Der Stratus unterstützt folgende überspringbare Elemente: Fußnote, Seitenzahl, Anmerkung des Produzenten und Marginalie.

Näheres zu den Einstellungen für überspringbare Elemente, Wiedergabe, Überspringen und Nach Aufforderung, finden Sie im Kapitel zum Konfigurationsmenü. Wenn der Stratus während der Wiedergabe auf ein überspringbares Element stößt, verhält er sich folgendermaßen:

Wiedergabe: Das Element wird immer abgespielt.

Überspringen: Das Element wird niemals abgespielt.

3.8 Benutzerhandbuch — Bücherregaltaste (gedrückt halten)

Sie können jederzeit auf das eingebaute Benutzerhandbuch zugreifen, indem Sie die **Bücherregaltaste** gedrückt halten. Um es wieder zu verlassen, halten Sie die **Bücherregaltaste** erneut gedrückt.

3.9 Bücherregalnavigation — Bücherregaltaste

Drücken Sie die **Bücherregaltaste** mehrmals nacheinander, um sich durch die fortlaufende Liste der Bücherregale zu bewegen. Dabei werden keine leeren Bücherregale angesagt. Jedes Bücherregal beinhaltet bestimmte Buch- und Dateitypen. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „Struktur der Bücherregale“. Mit den Tasten nach **Links/Rechts** bewegen Sie sich nacheinander durch die Titel eines Bücherregals. Wenn Sie beim gewünschten Buch angekommen sind, öffnen Sie es mit der **Wiedergabetaste**.

3.9.1 Ordernavigation in Bücherregalen

Sie haben auch die Möglichkeit, eine verschachtelte Ordnerstruktur für die Bücherregale Hörbücher, Andere Bücher, Podcasts und Textdateien anzulegen. Statt sich mit den Tasten nach **Links/Rechts** nacheinander durch die einzelnen Bücher zu bewegen, können Sie dann auch mit den Tasten nach **Oben/Unten** eine Navigationsebene wählen. Wenn Sie dann die Taste nach **Links/Rechts** drücken, bewegen Sie sich fortlaufend durch die Ordner auf der gewählten Ebene. Wenn Sie beim gewünschten Ordner angekommen sind, drücken Sie erneut die Taste nach **Oben** oder **Unten**, um zur Buchebene des Ordners zu wechseln und dann das gewünschte Buch auswählen zu können. Auch bei der Navigation auf Buchebene bewegen Sie sich von Ordner zu Ordner. Der Stratus unterstützt bis zu 8 Ordner Ebenen unter dem Ordner \$VR. Wenn Sie mehr als 8 Ebenen haben, erkennt der Stratus alle weiteren Ebenen als Ebene 8. Wenn Sie auch Dateien im Hauptverzeichnis des Ordners \$VR ablegen, werden diese nur angezeigt, wenn Sie mit der Taste nach **Oben** oder **Unten** die Buchnavigation auswählen.

Anmerkung: Sie müssen keine Bücherregale mit verschachtelter Ordnerstruktur anlegen. Wenn Sie Ihre Bücher nicht auf mehreren Unterordner Ebenen ablegen möchten, können Sie das Bücherregal einfach mit den Tasten nach **Links/Rechts** auf der Buchebene durchstöbern.

3.10 Bücher löschen - Auswurfaste (gedrückt halten)

Wenn Sie sich durch das Bücherregal bewegen, können Sie Bücher von der SD-Karte löschen (mit Ausnahme des Gesamtmusikbuchs). Dazu halten Sie die **Auswurfaste** gedrückt.

3.11 Information

Drücken Sie die **Informationstaste**, um sich die aktuelle Leseposition und andere Informationen zum Buch ansagen zu lassen.

3.11.1 Verfügbare Informationen

Buchtitel

Aktuelle Seitenzahl (falls verfügbar)

Verstrichene Zeit und verbleibende Zeit

Anzahl der Bücher auf dem Medium

Anzahl der Seiten im ausgewählten Buch (falls verfügbar)

Gesamtspielzeit des Buches

Akkustatus

Die Seriennummer Ihres Stratus finden Sie im Akkufach.

4. ERWEITERTE FUNKTIONEN

4.1 Schlafmodus und Zeitanzeige

Mit der **Einschlaf**taste können Sie sich die Uhrzeit ansagen lassen und den Schlafmodus aktivieren.

Wenn Sie sie einmal drücken, hören Sie die Uhrzeit, gefolgt vom Datum.

Über die Einschlaffunktion können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dem sich der Stratus ausschaltet: 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten oder aus.

Drücken Sie die **Einschlaf**taste mehrmals nacheinander, bis Sie die gewünschte Einschlafzeit erreicht haben. Um die Einschlaffunktion auszuschalten, drücken Sie die **Einschlaf**taste so oft nacheinander, bis Sie am Punkt „Aus“ ankommen.

Wenn die Einschlaffunktion aktiviert ist, leuchtet ein orangefarbenes Lämpchen links von der **Einschlaf**taste. Eine Minute bevor der Player sich abschaltet, fängt das Licht an zu blinken, und der Player sagt an, dass er sich in einer Minute abschaltet. Ist die Zeit abgelaufen, sagt der Player, dass er sich abschaltet und schaltet sich ab, ohne zu piepen.

4.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Um Datum und Uhrzeit einzustellen, halten Sie die **Einschlaf**taste gedrückt. Mit den Pfeiltasten nach **Oben** und **Unten** bewegen Sie sich durch das Menü. Das Menü Datum und Uhrzeit enthält folgende Einträge: Uhrzeit einstellen, Datum einstellen und erweiterte Zeiteinstellungen. Wenn Sie beim gewünschten Menüpunkt angekommen sind, drücken Sie die Pfeiltaste nach **Rechts**, um ihn zu öffnen. Das Menü enthält mehrere Untermenüs. Zwischen den Untermenüs wechseln Sie mit den Pfeiltasten nach **Rechts** und **Links**. Mit den Pfeiltasten nach **Oben** und **Unten** bewegen Sie sich durch die Einstellungsmöglichkeiten des jeweiligen Untermenüeintrags. Mit der Pfeiltaste nach **Rechts** bestätigen Sie Ihre Auswahl und gehen zum nächsten Untermenü. Wenn Sie im letzten Untermenü angekommen sind, bestätigen Sie mit der Pfeiltaste nach **Rechts** Ihre Einstellungen und kehren zum Menü zurück. Drücken Sie nun die **Einschlaf**taste, um das Menü zu verlassen. Durch Drücken einer beliebigen anderen Taste können Sie das Menü jederzeit verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

Liste der Menüs und Untermenüs

Uhrzeit einstellen: Stunde, Minute

Datum einstellen: Jahr, Monat, Tag

Erweiterte Zeiteinstellungen: 12h-/24h-Format, Sommerzeiteinstellung

Mit der Sommerzeiteinstellung können Sie die Uhr schnell um eine Stunde vor- oder zurückstellen. Im Untermenü erweiterte Zeiteinstellungen können Sie zwischen Winterzeit und Sommerzeit wählen. ANMERKUNG: Durch diese Einstellung wird die Zeit nicht automatisch zweimal im Jahr umgestellt.

Beispiel:

Wenn Sie den Monat einstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Halten Sie die **Einschlaf**taste gedrückt, bis das Menü angesagt wird.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach **Unten** einmal, um den Eintrag **Datum einstellen** aufzurufen.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach **Rechts** zweimal, um den Eintrag **Monat** aufzurufen.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach **Oben** oder **Unten** so oft nacheinander, bis Sie den richtigen Monat erreicht haben.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach **Rechts**, um zum nächsten Eintrag (Tag) zu gelangen.

Wenn Sie den Tag nicht umstellen möchten, drücken Sie die Pfeiltaste nach **Rechts** noch einmal, um an das Ende des Menüs Datum einstellen zu gelangen. Dann werden alle im Menü Datum einstellen vorgenommenen Änderungen gespeichert.

4.3 Lesezeichen

Mit der **Lesezeichentaste** können Sie Stellen im Buch markieren, um sie später wiederzufinden.

4.3.1 Lesezeichen setzen

Um ein Lesezeichen zu setzen, halten Sie die **Lesezeichentaste** gedrückt. Jedem Lesezeichen wird eine Nummer zugeordnet. Eine Bestätigung des Lesezeichens und die zugeordnete Nummer werden angesagt.

4.3.2 Lesezeichen anspringen

Drücken Sie die **Lesezeichentaste** einmal. Wenn Sie die Ansage „Lesezeichenliste“ hören, drücken Sie Pfeil **Links** oder **Rechts**, um das gewünschte Lesezeichen auszuwählen. Dann drücken Sie **Wiedergabe**, um die Lesezeichenliste zu verlassen und die Wiedergabe an der gewählten Position zu starten.

ANMERKUNG: Die Lesezeichenliste enthält auch immer Lesezeichen für Anfang und Ende des Buches. Die Lesezeichen werden nach ihrer Position im Buch, nicht nach ihrer Nummer, sortiert.

4.3.3 Lesezeichen löschen

Drücken Sie die **Lesezeichentaste** zweimal, um alle Lesezeichen des aktuellen Buches zu löschen. Der Player fordert Sie auf, dies zu bestätigen. Zum Bestätigen drücken Sie **Wiedergabe**. Zum Abbrechen drücken Sie eine beliebige andere Taste.

ANMERKUNG: Lesezeichen und aktuelle Positionen werden für jedes Buch einzeln gespeichert.

5. Struktur und Merkmale der Bücherregale

Für die Dateien aller Bücherregale gilt, dass Dateinamen inklusive Dateipfad maximal 512 Zeichen umfassen dürfen (d. h. Medium/Buchpfad). Wenn nach dem Einlegen eine Speicherkarte abgesucht wird, werden Ordner und Dateien, deren Pfadname mehr als 512 Zeichen umfasst, ignoriert.

In den folgenden Abschnitten finden Sie allgemeine Regeln und Informationen zur Nutzung der Bücherregale.

5.1 Hörbücher

5.1.1 Struktur der Hörbücher

Hörbücher sind DAISY-, NISO NIMAS- oder EPUB-Bücher und werden im Bücherregalordner \$VRDTB abgelegt. DAISY- und NISO-Bücher müssen jeweils in einem eigenen Ordner gespeichert werden. EPUB-Bücher bestehen jeweils aus nur einer Datei. Die folgende Liste zeigt ein Beispiel, wie Buchdateien in Ordner einsortiert werden können. Sie können bis zu 8 Ordnerstufen anlegen.

Ordner: \ \$VRDTB.

Regeln: Jede EPUB-Datei und jeder DAISY-Ordner ist als Buch mit eigenen Lesepositionen und Lesezeichen definiert. Beim Navigieren durch das Bücherregal können die einzelnen Bücher durch Gedrückt-halten der **Auswurfaste** gelöscht werden.

Datei: \ \$VRDTB\Book1.EPUB

Regeln: Ein EPUB-Buch im Hauptverzeichnis von \$VRDTB.

Ordner: \ \$VRDTB\Buch1

Regeln: Ein Ordner mit DAISY- oder NISO-Buchdateien. Es handelt sich also um ein DAISY- oder NISO-Buch im Hauptverzeichnis von \$VRDTB.

Ordner: \ \$VRDTB\Drama.

Regeln: Ein möglicher Ordner, in den eine bestimmte Kategorie von Büchern eingeordnet wird. Er kann weitere Ordner mit Unterkategorien, EPUB-Bücher oder DAISY-/NISO-Buchordner enthalten.

Ordner: \ \$VRDTB\Drama\BuchA.EPUB

Regeln: Eine EPUB-Buchdatei der Kategorie Hörspiele/Dramen.

Ordner: \ \$VRDTB\Drama\BuchB.

Regeln: Ein Ordner mit DAISY- oder NISO-Buchdateien. Der Gesamtordner ist als Buch definiert.

Ordner: \ \$VRDTB\Mystery.

Regeln: Ein möglicher Ordner, in den eine bestimmte Kategorie von Büchern eingeordnet wird.

Ordner: \ \$VRDTB\Mystery\BuchC.

Regeln: Wie Buch B.

5.1.2 Eigenschaften von Hörbüchern

Bücherregal durchsuchen: Bewegen Sie sich mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** durch die Ordnerstufen. Beachten Sie dabei, dass die unterste Ordnerstufe gleichzeitig die Buchebene ist, da ein Buch als eine Anzahl Dateien in einem Ordner der untersten Ebene definiert ist. Ordner

auf höheren Ebenen bieten die Möglichkeit, Bücher nach Kategorien zu ordnen, so wie der Ordner „Drama“ im obigen Beispiel. Sie können bis zu 8 Ordner Ebenen anlegen. Wenn Sie die **Auswurfaste** gedrückt halten, können Sie ein Buch löschen. Das funktioniert allerdings nur auf der Buchebene.

Lesen: Mit den Tasten nach **Rechts** und **Links** navigieren Sie durch das Buch, und mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** wählen Sie ein Navigationselement aus. Die Navigationselemente Überschrift, Seite, Phrase und Zeitsprung sind verfügbar.

Information: Gibt Informationen zum aktuellen Buch.

5.2 Andere Bücher

5.2.1 Struktur für andere Bücher

Die folgende Liste zeigt ein Beispiel, wie Buchdateien in Ordner einsortiert werden können. Die Ordner werden in der Reihenfolge nummeriert, in der sie gefunden werden, beginnend beim Hauptverzeichnis, wenn dieses auch Dateien enthält. Sie können bis zu 8 Ordner Ebenen anlegen.

Ordner: \SVROtherBooks.

Regeln: Jede Datei im Hauptverzeichnis ist als Buch mit eigenen Lesepositionen und Lesezeichen definiert. Beim Navigieren durch das Bücherregal können die einzelnen Buchdateien durch Gedrückt-halten der **Auswurfaste** gelöscht werden.

Ordner: \SVROtherBooks\Drama.

Regeln: Ein möglicher Ordner, in den eine bestimmte Kategorie von Büchern eingeordnet wird.

Ordner: \SVROtherBooks\Drama\BuchA.

Regeln: Ein Ordner mit Buchdateien. Der Gesamtordner ist als Buch definiert. Beim Navigieren durch das Bücherregal kann das Buch durch Gedrückt-halten der **Auswurfaste** gelöscht werden, d. h., dass der gesamte Buchordner gelöscht wird.

Ordner: \SVROtherBooks\Drama\BuchB.

Regeln: Wie Buch A.

Ordner: \SVROtherBooks\Mystery.

Regeln: Ein möglicher Ordner, in den eine bestimmte Kategorie von Büchern eingeordnet wird.

Ordner: \SVROtherBooks\Mystery\BuchC.

Regeln: Wie Buch A.

5.2.2 Eigenschaften von anderen Büchern

Bücherregal durchsuchen: Bewegen Sie sich mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** durch die Ordner Ebenen. Beachten Sie dabei, dass die unterste Ordner Ebene gleichzeitig die Buchebene ist, da ein Buch als eine Anzahl Dateien in einem Ordner der untersten Ebene definiert ist. Ordner auf höheren Ebenen bieten die Möglichkeit, Bücher nach Kategorien zu ordnen, so wie der Ordner „Drama“ im obigen Beispiel. Sie können bis zu 8 Ordner Ebenen anlegen. Wenn Sie die **Auswurfaste** gedrückt halten, können Sie ein Buch löschen. Das funktioniert allerdings nur auf der Buchebene.

Lesen: Die Wiedergabe bewegt sich zwischen den Dateien eines Ordners (Buches). Bewegen Sie sich mit den Tasten nach **Rechts** und **Links** zwischen den Dateien eines Ordners. Die Navigationselemente Datei und Zeitsprung sind verfügbar.

Information: Ansage der Informationen zum aktuellen Buch (Ordner).

5.3 Bücherregal Musik

Für das Bücherregal Musik ist der Ordner \$VRMusic vorgesehen. Er beinhaltet eine Ordnerstruktur mit Audiodateien, die als Ganzes das Gesamtmusikbuch bildet. Wenn Sie keine Playlists erstellen, ist es das einzige Musikbuch. Wenn Sie Playlistdateien (M3U) im Hauptverzeichnis von \$VRMusic speichern, bildet jede Playlist ein eigenes Musikbuch.

5.3.1 Struktur für Musik

Im Bücherregal Musik können Sie auf maximal 8 Ordner Ebenen navigieren. Wählen Sie mit den Tasten nach **Oben** oder **Unten** das Navigationselement „Datei“ oder „Ordner“ aus. Dann können Sie sich mit den Tasten nach **Rechts** und **Links** auf der gewählten Ebene bewegen. Wenn Sie mehr als 8 Ordner Ebenen haben, werden die zusätzlichen Ebenen der Ordnerliste auf Ebene 8 hinzugefügt.

Wenn Sie das Navigationselement „Datei“ wählen, wird der Name der aktuellen Datei angesagt. Wenn Sie die Navigation auf einer der Ordner Ebenen wählen, wird der Name des aktuellen Ordners auf dieser Ebene angesagt. Von jedem Punkt innerhalb Ihrer Struktur aus können Sie auch die unterste Navigationsebene wählen. Ist der aktuelle Ordner auf einer höheren als der untersten Ebene, so wird der Ordnername dann aber nicht angesagt. Nehmen wir z. B. an, Sie haben eine Musikstruktur mit den Ordnern \$VRMusic\Klassik\Mozart und \$VRMusic\Klassik\Beethoven\Neunte_Symphonie. Sie befinden sich im Ordner Klassik\Mozart und haben die Wiedergabe gestoppt. Wenn Sie nun die Navigation von „Datei“ auf „Ebene 1“ umstellen, so wird „Klassik“ angesagt. Wenn Sie von „Ebene 1“ auf „Ebene 2“ wechseln, wird „Mozart“ angesagt. Wenn Sie dann noch auf „Ebene 3“ wechseln, wird nichts angesagt, da es in Klassik\Mozart keinen Ordnernamen auf Ebene 3 gibt. Befinden Sie sich dagegen bei angehaltener Wiedergabe im Ordner Klassik\Beethoven, wird bei einem Wechsel von „Ebene 2“ auf „Ebene 3“ „Neunte_Symphonie“ angesagt.

Wenn Sie Dateien im Hauptverzeichnis des Ordners \$VRMusic speichern, werden Sie nur auf der Navigationsebene Datei angesagt.

5.3.2 Eigenschaften von Musik

Bücherregal durchsuchen: Bewegen Sie sich mit den Tasten nach **Rechts** und **Links** durch die einzelnen Musikbücher. Beachten Sie, dass sich nur ein Musikbuch, das Gesamtmusikbuch, im Bücherregal Musik befindet, wenn Sie keine zusätzlichen Bücher in Form von Playlists erstellen. Sie können keine Bücher löschen, indem Sie die **Auswurfaste** gedrückt halten.

Lesen: Wenn Wiederholung eingestellt ist, werden die Dateien eines Musikbuchs wiederholt. Nach der letzten Datei eines Ordners wird die erste Datei des nächsten Ordners abgespielt. Mit den Tasten nach **Oben** oder **Unten** können Sie Ordner- oder Dateinavigation auswählen.

Information: Gibt Informationen über das aktuelle Musikbuch, wie etwa die Gesamtanzahl der Ordner und Dateien sowie die Gesamtzeit des Buches.

Geschwindigkeit: Der Stratus setzt die Geschwindigkeitseinstellung auf normale Geschwindigkeit und kehrt zur vorherigen Geschwindigkeitseinstellung zurück, wenn Sie das Bücherregal Musik verlassen. Anmerkung: Stereo-Musik kann nur in normaler Geschwindigkeit wiedergegeben werden. Wenn Sie eine höhere oder niedrigere Geschwindigkeit einstellen, wird die Musik in Mono abgespielt.

5.3.3 Playlists

Das Bücherregal Musik kann Playlists enthalten. Eine Playlist ist eine Textdatei mit der Endung „m3u“, die eine Liste abzuspielender Audiodateien in unterstützten Formaten enthält. Eine Playlist kann nicht mit anderen Playlists verbunden werden.

5.3.4 Ansage von Ordner- und Dateinamen

Beim Durchsuchen des Bücherregals Musik möchten Sie vielleicht nicht immer die Ansage von Ordner- und Dateinamen hören. Der Stratus gibt Ihnen diese Informationen, wenn die Wiedergabe ausgeschaltet ist, sagt sie jedoch im Wiedergabemodus nicht an. Wenn Sie sich mit den Tasten nach **Rechts** und **Links** zwischen den Musikdateien bewegen und dabei die Ordner- und Dateinamen nicht hören möchten, drücken Sie einfach die **Wiedergabetaste**, damit der Player in den Wiedergabemodus schaltet.

5.4 Bücherregal Podcasts

Das Bücherregal Podcasts enthält eine Ordnerstruktur mit Audiodateien, bei der jeder Ordner einen Podcast Feed und jede Datei eine Episode des Feeds darstellt. Jede Datei (Episode) wird als separates Podcast-Buch definiert.

5.4.1 Podcaststruktur

Die folgende Liste enthält Beispiele zur Gruppierung von Podcastdateien zu Ordnern. Sie können bis zu 8 Ordner Ebenen anlegen.

Ordner: \$VRPodcasts

Kann Dateien enthalten: ja

Regeln: Alle im Ordner \$VRPodcasts befindlichen Dateien werden als einzelne Bücher angesagt.

Ordner: \ \$VRPodcasts\FeedA.

Kann Audiodateien enthalten: ja.

Regeln: Der Ordner, in dem die Dateien der Podcastepisoden nach ihrem Feednamen geordnet werden.

5.4.2 Eigenschaften von Podcasts

Bücherregal durchsuchen: Sie können sich zwischen Ordner Ebenen innerhalb der Podcaststruktur mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** bewegen. Die unterste Ebene ist die Buchebene (Dateiebene). Dateien im Hauptverzeichnis \$VRPodcasts werden nur auf der Buchebene angesagt. Verwenden Sie die Tasten nach **Rechts** und **Links**, um zwischen den Buchdateien der einzelnen Podcasts (Episoden) zu springen. Wenn Sie die **Auswurf Taste** gedrückt halten, können Sie eine Buchdatei löschen. Ein Buch kann nur dann gelöscht werden, wenn Sie sich auf der Buchebene befinden.

Lesen: Die Wiedergabe wird am Ende jeder Datei gestoppt. Über die Tasten nach **Oben** und **Unten** steht nur die Navigationsebene Zeitsprung zur Verfügung.

Information: Gibt Informationen über das aktuelle Podcastbuch (die aktuelle Datei).

Wenn Sie sich nicht alles anhören möchten, drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um die Ansage abzubrechen und die Wiedergabe fortzusetzen.

5.5 Bücherregal Text

Der Stratus kann auch Textdateien speichern, die im dafür vorbehaltenen Ordner \$VRText angeordnet sind. Sie werden über die Sprachausgabe des Stratus wiedergegeben. Jede Textdatei im Ordner \$VRText wird als Buch behandelt. Die unterstützten Formate sind: TXT, HTML, XML, RTF, BRF, BRA, SES3 und DOCX. Es werden Bildbeschreibungen bei HTML- und XML-Dateien angesagt, sofern sie verfügbar sind.

5.5.1 Struktur der Textdateien

Die Textdateien können entweder im Hauptverzeichnis von \$VRText gespeichert, oder in Unterordnern angeordnet sein. Sie können bis zu 8 Ordner Ebenen anlegen.

5.5.2 *Eigenschaften von Textdateien*

Bücherregal durchsuchen: Sie können sich mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** zwischen Orderebenen der Struktur für Textdateien bewegen. Die unterste Ebene ist die Buchebene (Dateiebene). Dateien im Hauptverzeichnis von \$VRText werden nur auf der Buchebene angesagt. Mit den Tasten nach **Rechts** und **Links** können Sie sich zwischen den Textdateien bewegen. Wenn Sie die **Auswurfaste** gedrückt halten, können Sie eine Textdatei löschen. Ein Buch kann nur dann gelöscht werden, wenn Sie sich auf der Buchebene befinden.

Lesen: Die Wiedergabe wird am Ende jeder Datei gestoppt. Die Navigationsebenen über die Tasten nach **Oben** und **Unten** sind Seite (wenn sich Seitenmarkierungen in der Datei befinden), Bildschirm (falls keine Seitenmarkierungen verfügbar sind), Absatz, Zeile, Satz, Wort, buchstabieren und Zeichen. Wenn Sie innerhalb eines Textes eine Suche durchführen, wird die Ebene Suchen als letzte Navigationsebene hinzugefügt, damit Sie den nächsten oder vorigen Suchbegriff suchen können.

Information: Gibt Informationen über die aktuelle Textdatei, wie etwa zu deren Größe.

5.5.3 *Überschriftsnavigation in HTML-/XML-/DOCX-Dateien*

HTML-/XML-Dateien, die Überschriftsmarkierungen (<H1> bis <H6>) haben, erhalten die äquivalenten Navigationsebenen 1 bis 6 im Menü, das Sie über die **Oben-/Untentaste** erreichen. Bei einigen HTML-/XML-Dateien werden diese Markierungen jedoch nicht konsequent eingesetzt. Die Datei kann die Überschriftsmarkierungen H1 und H3 haben, jedoch keine für H2. In diesem Fall wird der Stratus nur die Ebenen 1 und 3 im Navigationsmenü über die **Oben-/Untentaste ansagen**. In einer HTML-/XML-Datei kann es auch nur eine Überschrift H1 für einen Titel geben und keine weiteren Überschriften mit der Markierung H1. In diesem Fall springt der Stratus ans Ende der Datei, wenn Sie nach Auswahl der Navigationsebene 1 die **Rechtstaste** drücken.

6. Das Konfigurationsmenü

Über das Konfigurationsmenü können Sie den Stratus an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sie öffnen das Menü, indem Sie die **Informationstaste** gedrückt halten. Wenn Sie die **Informationstaste** erneut drücken, wechseln Sie zum nächsten Menü. Mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** bewegen Sie sich durch die Menüeinträge. Wählen Sie mit den Tasten nach **Links/Rechts** eine Einstellung aus und bestätigen mit der **Wiedergabetaste**. Zum Verlassen des Menüs, halten Sie die **Informationstaste** gedrückt.

6.1 Liste der Menüs und Menüeinträge

Im Folgenden sind die verfügbaren Menüs, ihre Einträge und Einstellungen in korrekter Reihenfolge aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass der jeweils erste Eintrag einer Liste die Werkseinstellung ist.

Menü: Navigation & Wiedergabe.

Eintrag: Wiedergabe.

Einstellungen: Schleife (einschalten, ausschalten).

Eintrag: Zeitsprung.

Einstellungen: 1, 5, 10 oder 30 Minuten als Zeitsprung im Navigationsmenü, erreichbar mit Tasten nach **Oben/Unten**.

Eintrag: Tastentöne

Einstellungen: einschalten, ausschalten

Eintrag: Einschlafnachrichten

Einstellungen: einschalten, ausschalten

Eintrag: Lesezeichenalarm

Einstellungen: ausschalten, einschalten

Menü: Überspringen.

Eintrag: Alle.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung, Benutzerdefiniert.

Eintrag: Fußnote.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung.

Eintrag: Seitenzahl.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen.

Eintrag: Anmerkung des Produzenten.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung.

Eintrag: Marginalie.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung.

Menü: Sprache.

Eintrag: Sprachausgabensprache

Einstellungen: Zwischen verfügbaren Sprachen umschalten

Eintrag: Braillezeichensatz

Einstellungen: Zwischen verfügbaren Braille-Zeichentabellen wechseln

Eintrag: Codeseite (falls auf Sprache anwendbar)
Einstellungen: Zwischen verfügbaren Codeseiten wechseln

6.1.1 Wiedergabe

Schleife

Wenn Sie den Modus Schleife auswählen, wird die Wiedergabe nach dem Ende eines Buches automatisch am Anfang neu gestartet.

Zeitsprung

Mit dieser Einstellung können Sie die Länge des Zeitsprungs festlegen. Sie können beim Lesen eines Buches die Navigationsoption Zeitsprung mit den Tasten nach **Oben** und **Unten** auswählen. Mit den Tasten nach **Links** und **Rechts** können Sie sich dann im Text um das gewählte Zeitsprungsintervall rückwärts und vorwärts bewegen.

Tastentöne

Hier können Sie einstellen, ob Sie bei jedem Tastendruck einen Piepton hören möchten. Wenn Sie die Tastentöne ausschalten, entfällt auch der zweite Piepton beim Starten der Wiedergabe. Bei Auslieferung sind die Tastentöne eingeschaltet. Unabhängig von der Menüeinstellung piepen die Regler für Klang, Lautstärke und Geschwindigkeit nur bei der niedrigsten, höchsten und Normaleinstellung.

Einschlafnachrichten

Die Meldungen der Einschlaf Funktion eine Minute vor und beim Ausschalten können ein- und ausgeschaltet werden. Bei Auslieferung sind sie eingeschaltet.

Lesezeichenalarm

Ist diese Option aktiviert, hören Sie jedes Mal eine Meldung, wenn Sie auf ein Lesezeichen treffen. Der Meldung folgt dann die jeweilige Lesezeichennummer.

6.1.2 Überspringen

Das Menü *Überspringen* beinhaltet die Konfigurationsoptionen für die überspringbaren Elemente. *Wiedergabe* ist voreingestellt. Hier eine Liste der Menüeinträge und ihrer jeweiligen Einstellungen:

Alle.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung, Benutzerdefiniert.

ANMERKUNG: Benutzerdefiniert kann nicht ausgewählt werden. Diese Einstellung wird automatisch gesetzt, wenn Sie die Einstellung eines überspringbaren Elements verändern.

Fußnote.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung.

Seitenzahl.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen.

Anmerkung des Produzenten.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung.

Marginalie.

Einstellungen: Wiedergabe, Überspringen, Nach Aufforderung.

7. Akkuwechsel

Wenn Sie einen neuen Akku benötigen, wenden Sie sich an HumanWare oder Ihren autorisierten Händler.

7.1 Alten Akku entfernen

Legen Sie den Victor Reader Stratus vor sich auf einen Tisch oder eine andere glatte Oberfläche.

Drehen Sie den Victor Reader Stratus verkehrt herum, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Legen Sie den Player so hin, dass der Tragegriff von Ihnen weg zeigt.

Suchen Sie den Deckel des Akkufachs bei der Öffnung des Tragegriffs. Es gibt 2 Laschen. Sie haben 3 gut fühlbare Ausbuchtungen. Der Akkudeckel befindet sich genau unter den beiden Laschen. Um ihn zu öffnen, schieben Sie die beiden Laschen mit den Daumen gleichzeitig voneinander weg. Der Akkudeckel sollte nun leicht hervorstehen, und Sie können den Akku entnehmen.

7.2 Neuen Akku einlegen

Beim Einlegen der Akkus für den Victor Reader Stratus können Sie keine Fehler machen, denn Sie sind so konzipiert, dass sie nur richtig herum eingelegt werden können.

Um den Akku richtig in das Akkufach einzulegen, legen Sie ihn zunächst flach vor sich hin.

Der Akku ist rechteckig. Eine der 2 Flächen hat ein Etikett, dies ist die Unterseite. 2 der 4 Kanten sind ganz flach. Die beiden anderen Kanten haben Laschen und Kontakte.

Eine Seite hat eine einzelne Lasche in der Mitte, die von der Oberseite des Akkus ausgeht. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich ein Kontakt in der Mitte und zwei Laschen an jeder Seite des Kontakts.

Um den Akku einzulegen, legen Sie die Seite mit den beiden Laschen und dem Kontakt ein. Die Laschen und der Kontakt sollten in die dafür vorgesehenen Öffnungen passen. Anschließend drücken Sie den Akku herunter, sodass er fest einrastet.

Beachten Sie, dass ein neuer Akku normalerweise bei 50 % der eigentlichen Kapazität liegt und voll aufgeladen werden muss. Dazu schließen Sie den Stratus an eine Steckdose an.

8. Update der Stratus-Software

HumanWare kann von Zeit zu Zeit Updates der Stratussoftware anbieten. Das Softwareupdate ist eine UPG-Datei, die von der HumanWare-Website heruntergeladen werden kann.

Um Ihren Stratus zu aktualisieren:

- Brennen Sie die UPG-Datei auf eine CD oder kopieren Sie sie auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick.
- Verbinden Sie den Stratus mit einer Steckdose.
- Schalten Sie den Player ein und legen Sie die CD oder die SD-Karte/den USB-Stick ein.
- Das Update wird gestartet, und die Nummer der neuen Version, die installiert wird, wird angesagt. Alle 10 Sekunden wird eine Fortschrittmeldung ausgegeben.
- Wenn das Update vollständig installiert ist, schaltet sich der Player ab.

Sofern das Update über eine CD erfolgt ist, wird sie beim nächsten Einschalten des Stratus automatisch ausgeworfen.

9. Problembehandlung

9.1 Buchnavigation

1. Warum sagt der Victor Reader Stratus nicht immer dieselben DAISY-Navigationselemente an, wenn ich die Pfeiltasten nach **Oben** und **Unten** drücke?
Mit den Pfeiltasten nach **Oben** und **Unten** gehen Sie die DAISY-Navigationselemente durch, die der Hersteller des Buches festgelegt hat. Nicht alle DAISY-Bücher verfügen über alle Navigationselemente. Vielleicht hat der Hersteller Ihres Buches nur Überschriften der Ebene 1 (oft für Kapitel) eingefügt. Dann erreichen Sie mit den Pfeiltasten nach **Oben und Unten** auch nur die Einträge „Ebene 1“ und „Phrase“. Der Eintrag „Phrase“ ist immer verfügbar. Der Victor Reader Stratus kann nur auf den Ebenen navigieren, die der Buchhersteller definiert hat. Auch Phrasensprünge sind nicht bei allen Büchern gleich. Einige Hersteller fügen die Phrasenmarkierung nach jedem Satz ein, während andere die Phrase als willkürlichen Zeitsprung definieren. In anderen Fällen wurden Bücher von Kassetten umgewandelt und dabei eine ganze Kassettenspur als Phrase definiert. Bei Büchern mit wenigen oder gar keinen DAISY-Navigationselementen müssen Sie die **Vor-** und **Rückspultaste** nutzen. Die **Rückspultaste** ist links von der **Wiedergabetaste**, und die **Vorspultaste** ist rechts von der **Wiedergabetaste**.
2. Woher weiß ich, welche DAISY-Navigationselemente mein Buch hat?
Mit den Pfeiltasten nach **Oben** und **Unten** bewegt sich der Victor Reader Stratus durch die im Buch verfügbaren Navigationselemente. Bei vielen Herstellern gibt es am Anfang des Buches einen Abschnitt, in dem erklärt wird, welche Elemente des Buches Sie auf den einzelnen DAISY-Ebenen finden. Wenn Sie Fragen zu Navigationsmöglichkeiten in einem bestimmten Buch haben, wenden Sie sich an den Hersteller.
3. Wie kann ich schnell zum Anfang oder Ende eines Buches springen?
Der Victor Reader Stratus setzt automatisch Lesezeichen am Anfang und Ende des Buches. Drücken Sie die **Lesezeichentaste**, bis der Victor Reader „Lesezeichenliste“ sagt. Dann drücken Sie die Pfeiltaste **Nach Links**, bis „Buchanfang“ angesagt wird. Den Buchanfang finden Sie immer links von Ihrem ersten eigenen Lesezeichen. Ebenso erreichen Sie das Ende des Buches, wenn Sie in der Lesezeichenliste die Pfeiltaste **Nach Rechts** drücken, bis „Buchende“ angesagt wird. Das Buchende finden Sie immer rechts von Ihrem letzten eigenen Lesezeichen. Wenn Sie keine Lesezeichen gesetzt haben, müssen Sie in der Lesezeichenliste die Pfeiltaste **Nach Links** nur einmal drücken, um zum Buchanfang zu gelangen, oder die Pfeiltaste **Nach Rechts**, wenn Sie zum Ende möchten.

9.2 Der Akku und der Ladevorgang

1. Kann es dem Akku schaden, wenn ich das Netzteil lange angeschlossen lasse?
Nein, aber wenn Sie Ihren Victor Reader Stratus längere Zeit nicht benutzen, z. B. weil Sie in den Urlaub fahren, ist es am Besten, wenn Sie ihn vom Netz nehmen, damit kein Schaden durch Überspannung entsteht.
2. Kann ich den Akku wechseln?
Ja. Einen neuen Akku bekommen Sie bei HumanWare oder autorisierten Händlern.
3. Wie oft kann ich meinen Akku aufladen, bevor er ausgetauscht werden muss?
Der Akku kann normalerweise 300 Mal vollständig wieder aufgeladen werden. Danach lädt er sich immer noch auf, aber seine Ladekapazität lässt immer mehr nach. Wenn sich der Akku gar nicht mehr aufladen lässt, muss er ausgetauscht werden.

4. Welche Vorkehrungen soll ich treffen, wenn ich den Player über längere Zeit nicht nutze?
Für mehr als 3 Monate entfernen Sie am Besten den Akku aus dem Player. Player und Akku sollten bei einer Temperatur von -20 bis 35 Grad und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 90% ohne Kondensation gelagert werden.

9.3 CDs

1. Was muss ich tun, wenn meine CD stecken bleibt und sich nicht auswerfen lässt?
Versuchen Sie zunächst, den Victor Reader Stratus aus- und wieder einzuschalten, und anschließend die **Auswurfaste** zu drücken. Wenn die **Einschaltaste** nicht funktioniert (kein Piepton nach dem Tastendruck ist zu hören), halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt und lassen sie dann los. Halten Sie nun die **Auswurfaste** gedrückt, während Sie gleichzeitig die **Einschaltaste** drücken. Halten Sie die **Auswurfaste** so lange gedrückt, bis Sie die Meldung "Willkommen bei Victor Reader" hören. Danach sollte der Victor Reader Stratus die CD auswerfen.
2. Kann ich meinen Victor Reader Stratus beschädigen, wenn ich die CD verkehrt herum einlege?
Nein. Der Victor Reader wirft die CD dann einfach wieder aus.
3. Warum macht mein Victor Reader Stratus alle paar Minuten heulende oder quietschende Geräusche?
Dies sind die normalen Geräusche des Laufwerks, die während des Lesevorgangs von CDs entstehen. Bei Büchern auf DAISY-CDs wird die Drehzahl nach dem Lesevorgang verringert, um Strom zu sparen, und das Laufwerk ist so lange nicht zu hören, bis nach ein paar Minuten wieder Informationen eingelesen werden müssen. Wenn Sie Navigationstasten drücken oder zu einem Lesezeichen springen, dreht sich die CD ebenfalls, um den Player an der neuen Stelle zu positionieren.
4. Was soll ich tun, wenn meine CD springt oder zu spielen aufhört?
Oft werden CDs von schlechter Qualität oder mit Fingerabdrücken und Kratzern nicht richtig oder gar nicht abgespielt. Entnehmen Sie die CD. Reinigen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einem CD-Reinigungstuch, das Sie in den meisten Geschäften erwerben können, die auch CDs verkaufen. Benutzen Sie keine Papier- oder Taschentücher. Reinigen Sie die CD-Oberfläche von der Mitte ausgehend nach außen zum Rand hin in geraden Linien. Vermeiden Sie kreisförmige Bewegungen. Wenn die CD immer noch nicht abgespielt wird, sollten Sie sie auf Kratzer untersuchen. Verkratzte CDs sollten zurückgegeben und ausgetauscht werden.
5. Muss ich das CD-Laufwerk oder die Laserlinse reinigen?
Nein. Das in den Victor-Playern verbaute CD-Laufwerk muss nicht gereinigt werden.
6. Darf ich eine Braillebeschriftung oder andere Etiketten auf die CD aufkleben?
Nein. Ein Etikett kann das Gleichgewicht der CD negativ beeinflussen, da sie sich sehr schnell dreht. Außerdem könnte ein Etikett das Laufwerk beschädigen, wenn es sich im Player löst. Wenn Sie eine CD mit einem Etikett in Braille oder anderen als den Etiketten des Herstellers bekommen, entfernen Sie sie vor dem Abspielen.
7. Warum höre ich manchmal beim Drücken einer Taste die Meldung "Bitte warten", selbst dann, wenn eine CD bereits eingelesen wurde?
Dies kann passieren, wenn Sie nach dem Einlegen der CD oder dem Einschalten zu schnell eine Taste drücken. Der Victor Reader Stratus braucht einige Zeit, um die CD zu untersuchen und DAISY-Navigationsinformationen einzulesen. Warten Sie nach dem Einlegen einer CD oder dem Einschalten des Players so lange, bis der Victor Reader Stratus den Buchtitel ansagt, bevor Sie eine Taste drücken.
8. Was bedeutet die Meldung "Kein Buch auf Datenträger"?
Diese Meldung gibt der Victor Reader Stratus aus, wenn er den CD-Typ nicht erkennt. Der Victor Reader kann nur DAISY-, MP3- oder Audio-CDs abspielen.

9. Was bedeutet die Meldung "Audio nicht unterstützt"?
Auf der CD befinden sich Audiodateien, die der Victor Reader zwar erkennt, sie sind jedoch so formatiert, dass sie mit der Victor Reader Software nicht kompatibel sind. Setzen Sie den technischen Support von HumanWare davon in Kenntnis.
10. Kann ich meinen Victor Reader beschädigen, wenn ich verkratzte CDs abspiele?
Nein. Die Leselinse des CD-Laufwerks kommt mit der CD-Oberfläche nicht in Kontakt und wird daher nicht beschädigt, wenn die CD Kratzer aufweist. Auch nutzt sie sich nicht durch wiederholtes Abspielen ab, wie dies bei Kassetten der Fall ist.

9.4 Allgemeines

1. Was mache ich, wenn die **Einschalttaste** nicht funktioniert?
Wenn kein Piepton beim Betätigen der **Einschalttaste** zu hören ist, vergewissern Sie sich zunächst, dass der Player am Strom angeschlossen ist. Funktioniert die **Einschalttaste** immer noch nicht, drücken Sie sie und halten sie 10 Sekunden lang gedrückt. So wird ein Reset des Players durchgeführt. Drücken Sie die Taste erneut und der Victor Reader sollte piepen und normal starten.
2. Kann die eingebaute Software des Victor Readers aktualisiert werden?
Ja. Sobald HumanWare die Software des Victor Readers aktualisiert hat, können die Kunden sie mit einer speziellen Upgrade-CD installieren, die sie einfach in den Player einlegen, und die die Software automatisch aktualisiert. Die Upgrade-CD kann über den Support von HumanWare bezogen, direkt von der Webseite von HumanWare heruntergeladen, oder über einige Händler bestellt werden, die diesen Support anbieten.
3. Sollte ich Lesezeichen löschen, um Speicherkapazität freizumachen?
Nein. Der Victor Reader kann über 1500 auf mehrere Bücher verteilte Lesezeichen speichern. Selbst wenn Sie diese hohe Zahl überschreiten, löscht der Victor die am wenigsten genutzten Lesezeichen. Sie müssen also nur dann Lesezeichen löschen, wenn Sie sie nicht mehr haben möchten.

10. Technische Spezifikationen

- Abmessungen ohne Abdeckung: 22 X 21,6 X 4,8 cm (8,7 X 8,5 X 1,9 Zoll)
- Abmessungen mit Abdeckung 22,8 X 22,2 X 5,1 cm (9 X 8,7 X 2 Zoll)
- Gewicht: 0,95 kg (2,1 Pfund) mit Akku
- Unterstützte DAISY-Formate: DAISY 2.0 und 2.0.2
DAISY NISO Z39.86 2002 und Z39.86 2005
- Akkutyp: Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku. 8,4 V, 1650 mAh
- Ladezeit: 4 Stunden
- Betriebsdauer: 10 Stunden für ununterbrochene Wiedergabe von DAISY-MP3-Büchern
- Stromversorgung: Das mitgelieferte Netzteil erfüllt nur die Energieanforderungen des Landes, in dem es gekauft wurde. Setzen Sie sich für Netzteile anderer Länder mit ihrem Händler in Verbindung.
- Codierungsalgorithmen: AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
- Netzteilanschluss 2,5 mm (intern)/ 5,5 mm (extern)
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm
- **Geräteklassifizierung (IEC 601-1)**
- Schutzart: Klasse 1
- Anwendungsteile: Keine
- Sterilisierungsmethode: Nicht zur Sterilisierung bestimmt
- Gehäuseschutzart: IP20
- Gerät nicht von der Kategorie AP oder APG
- Betriebsart: Fortlaufend
- **Umgebung**
- Betriebstemperatur 10 bis 40 °C
- Transport- und Lagertemperatur -20 bis 60 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 % bis 80 % (RH)
- Luftfeuchtigkeit für Transport und Lagerung 10 % bis 95 % (RH)
- Betriebshöhe -200 bis 2000 m
- Transport- und Lagerungshöhe -200 bis 12.000 m
- Luftdruck für Transport und Lagerung 70-103 kPa

Weitere Informationen erhalten Sie bei HumanWare:

Service
1800 Michaud
Drummondville, Québec
Kanada J2C 7G7

Telefon: 1 (819) 471-4818
Gebührenfrei (USA und Kanada): 1 (888) 723-7273
Fax: 1 (819) 471-4828
Website: www.humanware.com

11. Technische Unterstützung

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie die Ihnen am nächsten gelegene Niederlassung von HumanWare oder besuchen Sie unsere Webseite unter: www.humanware.com

Nordamerika: 1(800) 722-3393 oder per E-Mail an us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 oder per E-Mail an eu.support@humanware.com

Australien / Asien: (02) 9686 2600 oder per E-Mail an au.sales@humanware.com

12. Herstellergarantie

Dieses Gerät ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das mit größter Sorgfalt hergestellt und verpackt wurde. Auf alle Geräte und Komponenten wird eine Garantie gegen Funktionsstörungen wie folgt gewährt:

USA und Kanada: ein (1) Jahr

Kontinentaleuropa und Großbritannien: Zwei (2) Jahre

Australien und Neuseeland: ein (1) Jahr

Andere Länder: ein (1) Jahr

Die Garantie schließt alle Teile (ausgenommen Akku) sowie den Arbeitsaufwand ein. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder telefonisch an die technische Unterstützung des Herstellers.

Anmerkung: Die Garantiebedingungen können gelegentlich geändert werden, daher informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen auf unserer Webseite.

Bedingungen und Einschränkungen:

Es wird kein garantiebender Ersatz oder keine Reparaturleistung durchgeführt, falls dem Gerät keine Kopie des originalen Kaufbelegs beiliegt. Bitte bewahren Sie das Original des Kaufbelegs gut auf. Verwenden Sie für eine Einsendung des Geräts stets die Originalverpackung. Diese Garantie gilt in all denjenigen Fällen, bei denen der Schaden nicht durch unangemessenen Gebrauch, Fehlbehandlung, Vernachlässigung oder höhere Gewalt verursacht wurde.

13. Endbenutzerlizenzvertrag

Durch die Nutzung dieses Produkts (Victor Reader Stratus), erklären Sie sich mit den folgenden Mindestbedingungen einverstanden.

1. Lizenz. HumanWare gewährt dem Endnutzer ein nicht-ausschließliches, nicht übertragbares Recht und die Lizenz zur Nutzung der Software für dieses Produkt.
2. Besitzansprüche der Software. Der Endbenutzer erkennt an, dass alle Rechte, Titel und Interessen am Original oder an Kopien der Software, die Bestandteil dieses Produkts ist, bei HumanWare verbleiben. Ferner erklärt der Endbenutzer, dass er die Software dieses Produkts nicht verändern, portieren, übersetzen, dekompileieren, disassemblieren, rückentwickeln, oder in jedweder Form veröffentlichen wird.

Dieses Produkt beinhaltet vom OpenSSL Project entwickelte Software zur Nutzung im OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

14. Anhang 1 - Fehlermeldungen

SYSTEM Fehler 1: CDROM, Fehler beim Zugriff auf CDROM-Laufwerk.
SYSTEM Fehler 2: SPEICHER, Problem bei Speicherzuweisung.
SYSTEM Fehler 3: AKKU, Fehler beim Erkennen des Akkus.
SYSTEM Fehler 4: INT_SPEICH_FEHL, Fehler bei Erkennung des internen Speichers
SYSTEM Fehler 5: INT_SPEICH_BESCH, Interner Speicher beschädigt

MEDIEN Fehler 1: LESEN, Fehler beim Lesen eines Sektors auf der CD.
MEDIEN Fehler 2: FORMAT, Nicht unterstütztes Dateisystem.
MEDIEN Fehler 3: STARTEN, Fehler beim Starten des Geräts.
MEDIEN Fehler 4: AUDIO, Ungültig.
MEDIEN Fehler 5: DATEI, Zugriffsfehler bei Audiodatei.
MEDIEN Fehler 6: WAV, Fehler bei Erstellung neuer WAV-Struktur.
MEDIEN Fehler 7: MPEG, Fehler bei der Behandlung einer mpeg-Datei.
MEDIEN Fehler 8: VORBIS, Fehler bei der Behandlung einer vorbis-Datei.
MEDIEN Fehler 9: KEIN AUDIO, keine Audioausgabe verfügbar.
MEDIEN Fehler 10: AMR-WB+, Fehler bei der Behandlung einer AMR-WB+-Datei.
MEDIEN Fehler 11: MP4-AAC, Fehler bei der Behandlung einer MP4-AAC-Datei.
MEDIEN Fehler 12: SCHREIBEN, Datei kann nicht zum Schreiben geöffnet werden.
MEDIEN Fehler 13: SDLOST, Karte während Schreibvorgang entfernt.
MEDIEN Fehler 14: USBLOST, USB-Gerät während Schreibvorgang entfernt.

BUCH Fehler 1: GENERISCH, Nicht spezifiziert.
BUCH Fehler 2: MP3, Fehler beim mp3-Decoder aufgetreten.
BUCH Fehler 3: VORBIS, Fehler beim ogg vorbis-Decoder aufgetreten.
BUCH Fehler 4: WAV, Fehler beim wav-Decoder aufgetreten.
BUCH Fehler 5: KEIN DATEINAME, Kein Dateiname verfügbar.
BUCH Fehler 6: KEINE AKT. POS, Keine aktuelle Position gesetzt.
BUCH Fehler 7: DATEI NICHT GEFUNDEN, Datei nicht auf MCART gefunden.
BUCH Fehler 8: AMR-WB+, Fehler beim AMR-WB+-Decoder aufgetreten.
BUCH Fehler 9: Audible.com DRM, Player aufgrund von DRM nicht zum Abspielen autorisiert.
BUCH Fehler 10: VRTEXT, Fehler beim Parsing der Textdatei.
BUCH Fehler 11: TEXTGRÖSSE, Textdatei zu groß.
BUCH Fehler 12: Braille-Übersetzungsfehler.
BUCH Fehler 13: MP4-AAC, Fehler beim MP4-AAC-Decoder aufgetreten.
BUCH Fehler 14: Text erneut parsen, Fehler beim erneuten Parsen der Textdatei.
BUCH Fehler 15: STRUKT_GRÖSSE, Struktur des Textbuchs zu groß.

Anmerkung: Einige der Meldungen treffen nicht auf alle Player-Modelle zu.

Kundendienst

Wenden Sie sich bitte an die nächste HumanWare Niederlassung oder besuchen Sie unsere Website unter:
www.humanware.com

Nordamerika : 1 (800) 722-3393
us.support@humanware.com

Europa : (0044) 1933 414800
eu.support@humanware.com

Australien / Asien : (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com


Humanware™

www.humanware.com
eu.support@humanware.com

REV 00