


# Bildschirmlesegerät

Viva

und

Viva Color

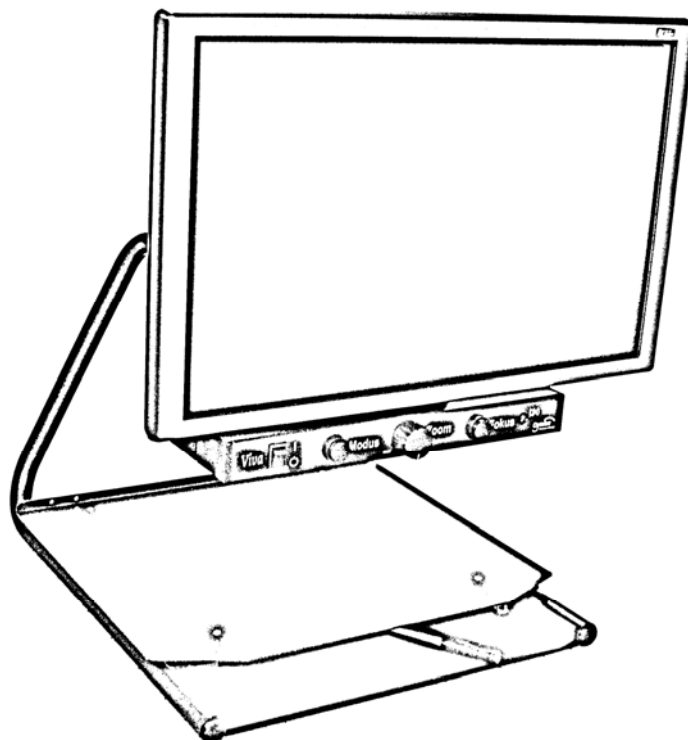

# Bedienungsanleitung



# Inhalt

1. Allgemeines
2. Wichtige Sicherheitsinformationen
3. Lieferumfang
4. Aufstellen des Gerätes
5. Die ersten Schritte
6. Lesen oder Betrachten von Fotos
7. Der Autofokus
8. Die Lesefarben (nur bei Viva Color)
9. Technische Daten
10. Service & Hilfestellung
11. Sicherheits- und Pflegehinweise



## 1. Allgemeines

Wir beglückwünschen Sie zum Erhalt Ihres Viva, einem hochwertigen Bildschirmlesegerät aus dem Hause Optelec. Viva ist zum häuslichen und beruflichen Einsatz ausgelegt. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über Aufbau, Bedienung und Pflege des Gerätes. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig alle Hinweise.

## 2. Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Vor der Reinigung des Gerätes trennen Sie immer das Gerät vom Stromanschluss. Benutzen Sie nur ein angefeuchtetes Tuch zur äußerlichen Reinigung.
2. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder unebene Oberfläche.
3. Zu Ihrer Sicherheit verbinden Sie das System nur mit einer geerdeten Steckdose.
4. Zur Wartung dieser Geräte nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Verkäufer auf. Öffnen oder entfernen Sie niemals die Gerätegehäuse.
5. Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Feuer benutzen oder lagern Sie die Geräte nicht in feuchten oder heißen Umgebungen.
6. Zum Schutz Ihrer Finger bewegen Sie den Lesetisch, in dem Ihre Hände auf der Lesetischplatte aufliegen.
7. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für einen späteren Gebrauch auf.

### 3. Lieferumfang

**Karton 1 enthält:**

- 1 Lesegerät (Unterteil/Kamerateil)
- 1 Netzgerät
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Verteilersteckdose


**Karton 2 enthält:**

- den Bildschirm
- 1 Stromanschlusskabel
- 1 VGA-Anschlusskabel
- 4 Rändelschrauben

## 4. Aufstellen des Gerätes


Stellen Sie das Lesegerät in maximaler Entfernung von ca. 1,8 Metern von einer Steckdose auf. Die Steckdose muss geerdet sein.

Befestigen Sie den Bildschirm mit den vier Rändelschrauben an dem Lesegerät. Sie können dabei die gewünschte Höhe je nach Bildschirmgröße in zwei Stufen verstellen.

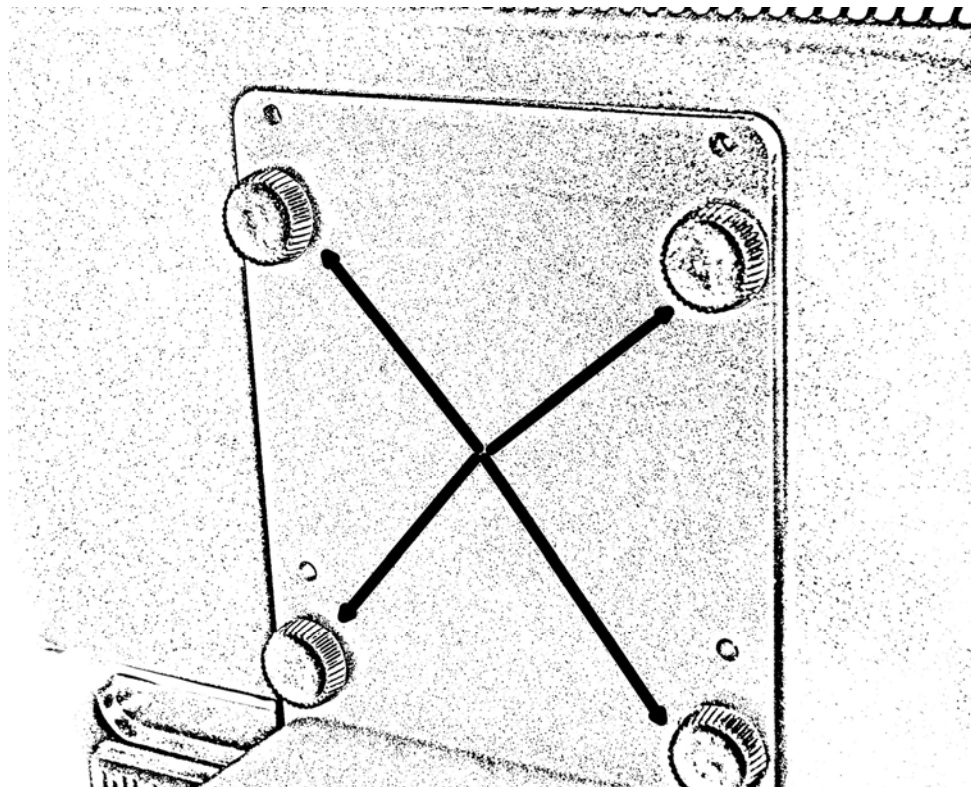


Entfernen Sie das rote Halteband (Transportsicherung) in der linken, hinteren Ecke des Lesetisches.

## Bedienungselemente des Viva

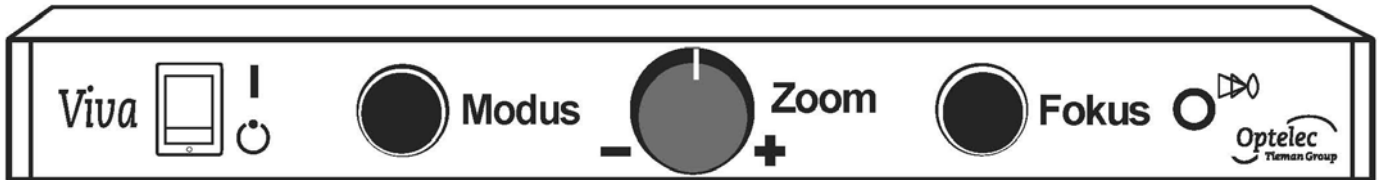

## Rückseite des Viva

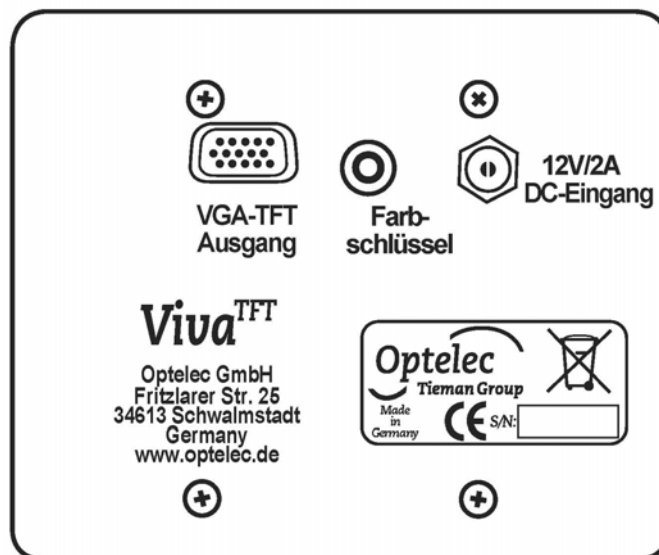

Schließen Sie das Monitorkabel an die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite des Lesegerätes an. Stecken Sie das Netzteil des Lesegerätes und das Netzkabel des Monitors über die Mehrfachsteckdose an Ihre Netzsteckdose an. Schließen Sie das Kabel des Netzgerätes an die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite des Lesegerätes an.



## 5. Die ersten Schritte

- Legen Sie eine Lesevorlage auf den Lesetisch.
- Schalten Sie den Viva ein, in dem Sie den Schalter an der linken Vorderseite nach oben drücken.
- Lösen Sie die Feststellbremse des Lesetisches indem Sie den runden Hebel an der vorderen Seite des Lesetisches ganz nach links bewegen. Schieben Sie den Hebel wieder ganz nach rechts, so wird der Lesetisch wieder festgestellt. Dies ermöglicht Ihnen eine arretierte Benutzung.
- Bewegen Sie den Lesetisch, bis Sie Ihre Lesevorlage auf dem Monitor sehen.
- Viva stellt die Schärfe durch einmaliges Drücken der Fokustaste ein.
- Wählen Sie nun die für Sie optimale Vergrößerung in dem Sie den großen Drehregler nach rechts oder links drehen. Eine Bewegung nach rechts erhöht, nach links vermindert die Vergrößerung.

## 6. Lesen oder Betrachten von Fotos

Mit dem Viva können Sie die Darstellung Ihrer Lesevorlage verändern: Drücken Sie hierzu den Taster mit der Bezeichnung Modus.

Es stehen drei Darstellungsarten zur Verfügung:

- Schwarzer Hintergrund und weiße Schrift mit hohem Kontrast für das Lesen von Texten.
- Graustufendarstellung zur Ansicht von Fotos usw. (Sollten Sie einen Viva Color erworben haben, wird Ihnen hier Ihre Vorlage in Echtfarbe gezeigt).
- Weißer Hintergrund mit schwarzer Schrift mit hohem Kontrast zum Lesen von Texten.

## **7. Der Autofokus**

Ihr Bildschirmlesegerät Viva stellt Ihnen Ihre Lesevorlagen mit Hilfe einer Autofokus-Einrichtung automatisch scharf dar.

Durch Betätigung des Fokus-Tasters an der rechten Seite wird die Lesevorlage scharf dargestellt.

## **8. Die Lesefarben (nur bei Viva Color)**

Viva Color bietet Ihnen zusätzliche Farbkontraste beim Lesen von Texten. Dazu ist in der Rückseite ein Farbschlüssel (Dongle) einzustecken.

Sollte der Farbschlüsselplatz werksseitig durch eine Kunststoffabdeckung verschlossen sein, so ist dieser Viva automatisch eine Color-Version und Sie benötigen keinen extra Farbschlüssel.

Zum Einstellen Ihrer Lieblingslesefarbe schalten Sie zunächst Ihren Viva aus.

Drücken Sie nun die Taste Modus, und halten Sie diese Taste gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.

Nach ein paar Sekunden beginnt die Leuchte des Autofokus zu blinken. Lassen Sie nun die Taste los. Mit der Fokustaste wählen Sie nun einen Modus aus den verschiedenen Farbkontrasten, den Sie als angenehm empfinden.

Schalten Sie nun den Viva aus und wieder ein.

Ihre Lesefarbe wird nun durch Druck auf den großen Drehregler ein- und wieder ausgeschaltet.

Beachten Sie bitte, dass sich der Viva nicht im Fotomodus befindet.

## 9. Technische Daten

### Viva

- Darstellung : schwarz / weiß / Foto
- Monitoranschluss : VGA - Ausgang
- Vergrößerung :
  - 5 – 55fach (bei 43,1cm Bildschirmdiagonale)
  - 5,5 – 60fach (bei 48,2cm Bildschirmdiagonale)
- Netzgerät : 100 – 240 V. AC  
12V / 2.0A DC
- Stromaufnahme : max. 0,6 A
- Frequenz : 50 - 60 Hz.

### Viva Color

Zusätzlich zum Viva:

- Echtfarbe
- Verschiedene Lesefarben

Die Optelec Tieman Group übernimmt keine Verantwortung, wenn dieses Produkt anders, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, benutzt wird.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien in Bezug auf Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit

Die Konformität erstreckt sich ausschließlich auf die von Optelec original gelieferten Komponenten.

## **10. Service und Hilfestellung**

Bei Bedienungsfragen zu Ihrem Lesegerät wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Ihr lokaler Händler:

### **Hersteller:**

**Optelec GmbH**

Fritzlärer Straße 25

34613 Schwalmstadt

Tel: 06691 9617-0 Fax: 06691 9617-27

[www.optelec.de](http://www.optelec.de) [info@optelec.de](mailto:info@optelec.de)

# **11. Sicherheits- und Pflegehinweise zum Optelec Bildschirmlesegerät**

## **Viva / Viva Color**

**Gerät nicht im Wasser oder in der Nähe von Wasser, sowie in Feuchträumen benutzen. Gerät nicht längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. Gerät nicht unter 0° oder über 40° Temperatur benutzen oder lagern. Vermeiden Sie scharfe Reinigungs- und Putzmittel. Nur mit weichem Reinigungstuch säubern. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung bringen.**

**Keine Gegenstände auf das Bedienteil legen, vermeiden Sie Stöße. Nicht werfen oder fallen lassen.**

**Gerät nicht öffnen, enthält keine von Ihnen wartbaren Teile. Bei Wartungsbedarf, fehlerhafter Arbeitsweise oder sonstigen Defekten kontaktieren Sie bitte Ihre nächste Optelec -Vertretung oder unsere Reparaturabteilung Tel. 06691 9617-0.**

**Risiken und Nebenwirkungen:  
Keine bekannt**

**Schwalmstadt, 01.011.2012**