



MagniLink Student Pro HD



Vergrößerung

Sehen

Bundesweit,
auch in Ihrer Nähe!
Kostenlose Service-Rufnummer:
0800 1119082

Optelec
Neue Freude am Leben

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

Optelec GmbH, Fritzlärer Straße 25, 34613 Schwalmstadt

Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27

E-Mail: info@optelec.de, www.optelec.de

MagniLink Student Pro HD



Die MagniLink Student Pro HD ist ein leichtes, tragbares Lesesystem. Es ermöglicht ein müheloses Lesen im Nah- und auch im Distanzbereich. Mit dem geringen Gewicht von lediglich 1,5 kg ist es als mobiles Gerät für den Einsatz in der Schule, am Arbeitsplatz oder sogar auf Reisen bestens geeignet. Das Gerät ist in wenigen Sekunden montiert und einsatzbereit. Es wird ganz einfach über die USB 2.0-Anschlüsse an den Computer oder das Notebook angeschlossen und gleichzeitig mit Strom versorgt, sodass keine zusätzliche Stromquelle erforderlich ist.

Müheleose Anwendung

Sämtliche Funktionen können Sie über die Tastatur des Computers oder mittels Bedienungsbox einstellen. Das Schalten zwischen Nahbild und Distanzmodus erfolgt mühelos. Der Kamerakopf ist vertikal und horizontal schwenkbar, was Ihnen eine höhere Flexibilität in der Anwendung gewährleistet. Das Kamerabild können Sie auf eine beliebige Größe und Position einstellen. Auch voreingestellte, schaltbare Bildschirmteilungen sind möglich.

Allgemeines

Die MagniLink Student Pro HD ist mit einer HD-Kamera ausgerüstet, die hervorragende, gestochen scharfe Bildqualität bietet. Dieses Gerät gestattet Ihnen mit dem Vergrößerungsbereich von 1,5 bis 55fach (auf 38,1 cm/15 Zoll Monitor) einen vorzüglichen Überblick. Mit diesem Bildüberblick und der einzigartigen Bildqualität ist die MagniLink Student Pro HD-Kamera ideal für Schulen und flexible Arbeitsplätze geeignet. Zusätzlich verfügt sie über eine Anschlussmöglichkeit an TV-Geräte mit VGA-Eingang und wird somit zu einem individuell einsetzbaren Hilfsmittel.

Optionale Möglichkeiten

Der MagniLink Reading Table ist ein tragbarer A4-Lesetisch. Die MagniLink Docking Station ist ein hochwertiger, stationärer A3-Lesetisch und bietet alle Vorteile eines stationären Lesesystems. Dieser Lesetisch kann an seinem Standort verbleiben, während Sie nur die Kameraeinheit für die aktuelle Konferenz oder das Kundengespräch von zu Hause mitnehmen müssen.

Eigenschaften und Vorzüge

Überlegene Bildqualität durch die höchste

Bildwiederholffrequenz, die zurzeit auf dem Markt erhältlich ist und die erreicht wird, wenn das Gerät zusammen mit einem Computer verwendet wird. Das Lesen wird für Sie angenehm und mühelos. Modernes Design mit flexiblem Klapparm macht Transport und Platzierung einfach. Die kurze Installationszeit gestattet den schnellen Transport zwischen verschiedenen Einsatz- und Arbeitsorten. Das Gerät stellt sich automatisch auf den voreingestellten Anzeige- und Vergrößerungsmodus ein. Die Software der MagniLink Student Pro HD können Sie durch logische Tastaturbefehle (z. B. Taste F5 für Schnappschüsse) steuern.

Systemanforderungen

Microsoft Windows XP mit Service Pack 2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 8 unter Vorbehalt; auch für Apple Systeme geeignet.

Wir empfehlen die MagniLink HD mit dem zum Kauf vorgesehenen Computer oder Notebook auf Kompatibilität zu testen.

Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

Vergrößerung

1,5 – 55fach
(auf 39,1 cm/15,4 Zoll Notebookdisplay)

Gewicht

1,5 kg

Kamera

HD 1280 x 720 Pixel

Darstellungsmodi

Echtfarbe, 6 verschiedene Lesefarben

Bildwiederholffrequenz

60 Einzelbilder pro Sekunde

Anschluss

Notebook, Computer, Monitor über VGA oder USB

Kompatibilität

Zoomtext, Lunar, LunarPlus und SuperNova

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

| | |
|-------|--------------------------|
| 13345 | MagniLink Student Pro HD |
|-------|--------------------------|

Wir behalten uns Änderungen vor.